

1574925 - Benjamin Boundy - 1 pc



Déscription

Soutien, positionne et enveloppe votre bébé dans diverses postures

Il est spécialement conçu pour le bébé malade à terme et convient au bébé prématuré plus mature qui est trop grand pour le nid, mais qui a besoin de protection et de soutien. Le Benjamin Boundy permet de positionner le bébé dans une orientation médiane. Celle-ci favorise le contact main-bouche et main-main, ce qui rend le bébé plus à l'aise et plus apte à s'autoréguler. En ayant les mains libres, le bébé est capable de se toucher spontanément le visage.

Informations pratiques concernant le Benjamin Boundy :

- Le Benjamin Boundy est disponible en taille unique et convient aux bébés pesant de 2 500 à 5 000 grammes.
- Le Benjamin Boundy se compose d'un rouleau intérieur étanche et amovible, rempli de granulés, et d'une couverture amovible et lavable.
- Les housses extérieures sont fabriquées dans un tissu à la technologie avancée qui consiste en un mélange de polyester et de coton. Ce tissu sèche quatre fois plus vite que le coton, ne se décolore pas, ne rétrécit pas et reste inodore.
- Le Benjamin Boundy peut uniquement être utilisé sous le contrôle du moniteur et sous surveillance médicale constante dans le service de néonatalogie et le service de pédiatrie par du personnel médical qualifié

Avantages du Benjamin Boundy :

Le Benjamin Boundy se compose d'un rouleau intérieur étanche et amovible, rempli de granulés, et d'une couverture amovible et lavable. Le rouleau intérieur flexible et souple du Benjamin Boundy permet de façonner le rouleau afin de soutenir correctement le bébé dans toutes les positions. Il est recommandé d'utiliser deux Benjamin Boundy en position dorsale et ventrale pour un soutien optimal. Les extrémités du Benjamin Boundy sont conçues pour soutenir le bébé là où c'est nécessaire et pour le positionner de manière optimale. Il peut être placé autour de la tête, du cou ou des hanches ou sous/contre un bras ou une jambe. En position dorsale et ventrale, nous recommandons d'utiliser deux Benjamin Boundy pour assurer une contention suffisante. En position dorsale, les extrémités peuvent être utilisées pour amener la tête dans la bonne position. Elles peuvent également être placées sur le bébé comme une « main » supplémentaire pendant un court

moment au cours des procédures afin de fournir une contention par le haut.

Spécifications

Marque	Benjamin Care
SKU leverancier	BB004-000
sku	1574925
Type d'emballage	Pièce