

## 1607302 - QualiBra Advanced - Bandage de soutien postopératoire pour le sternum et la poitrine - L plus - 1 pc



### Déscription

#### Brace pour le soutien du sternum et de la poitrine après une opération cardiaque

QualiBra Advanced est un soutien unique, conçu par des infirmières, destiné aux femmes ayant une taille de bonnet plus importante (à partir du bonnet D) qui subissent une sternotomie (incision au niveau du sternum). Ce double soutien-gorge et corset thoracique a été spécialement développé pour réduire la douleur et les risques d'infection après une opération à cœur ouvert et pour accélérer la convalescence. Le soutien aide à stabiliser confortablement votre sternum et vos seins lors des mouvements quotidiens tels que respirer, tousser, éternuer, se lever et marcher.

#### Pourquoi choisir ce produit plutôt qu'un soutien-gorge classique ?

Un soutien-gorge classique peut provoquer une pression, de la chaleur et de l'humidité autour de l'incision. QualiBra Advanced maintient mieux la zone de la plaie dégagée, offre un soutien autour de la poitrine et permet de soigner la plaie tout en préservant votre intimité.

#### Principaux avantages :

- Réduit le risque d'infection : Éloigne le tissu mammaire de la zone de la plaie, évitant l'accumulation de chaleur et d'humidité.
- Accélère la récupération : Moins de douleur, mobilité plus rapide, séjour hospitalier plus court et diminution des réadmissions.
- Soutien optimal lors de la toux et des mouvements : Les poignées intégrées dans la bande thoracique offrent un soutien direct lors de la toux, des éternuements, de l'effort ou des mouvements.
- Inspection confortable de la plaie : Sans dénuder complètement – ouvrez uniquement la bande thoracique ou la bande inférieure selon l'emplacement de la plaie.
- Protection continue du sternum : Que ce soit à l'hôpital ou à domicile, l'orthèse sert de rappel physique à la prudence.

**Double fonctionnalité :**

- Soutien latéral de la poitrine et stabilisation du sternum
- Poignées intégrées pour soutenir activement la pression lors d'efforts

**Utilisation recommandée :**

- Pour toutes les femmes après opérations à cœur ouvert ou interventions thoraciques avec sternotomie
- Fortement recommandé pour les patientes présentant un risque accru de complications, telles que :
  - Grande taille de poitrine
  - Surpoids
  - Diabète
  - BPCO ou problèmes de toux
  - Mobilité réduite
- Utilisation recommandée pendant au moins 6 à 8 semaines après l'opération

**Pourquoi un soutien-gorge post-opératoire standard est-il inadapté ?**

Les soutiens-gorge post-opératoires standards – tout comme les soutiens-gorge ordinaires – exercent souvent une pression sur les seins, les poussant vers le centre de la poitrine et créant un décolleté. Cette compression provoque une accumulation de chaleur et d'humidité autour de la plaie opératoire, ce qui augmente le risque d'infection et peut entraîner un séjour hospitalier plus long.

De plus, la plupart des soutiens-gorge sont fermés à l'arrière, ce qui oblige les patientes à bouger les bras vers l'arrière pour les enfiler ou les retirer – un mouvement qui charge le sternum et peut compromettre la cicatrisation. Enfin, les soutiens-gorge standards manquent d'une bande thoracique enveloppante, essentielle pour stabiliser le sternum après une sternotomie.

**Pourquoi le soutien latéral (latéral) du sternum est-il important ?**

Comme pour tout os fracturé, le sternum doit être soutenu à l'intérieur comme à l'extérieur pendant le processus de guérison. Après une sternotomie, le sternum est vulnérable aux mouvements quotidiens tels que la respiration, la toux, les éternuements, la poussée ou les activités courantes.

La bande thoracique QualiBra Advanced offre un soutien externe continu et renforce la fermeture interne réalisée par le chirurgien pendant l'opération. Cela aide à :

- Soulager la douleur en soutenant les muscles intercostaux
- Stimuler une respiration plus profonde (essentielle après une chirurgie cardiaque)
- Offrir une protection supplémentaire lors d'efforts augmentant la pression comme la toux ou les éternuements

**Pourquoi un soutien supplémentaire lors de la toux et des éternuements est-il crucial ?**

À chaque toux ou éternuement, il y a une augmentation soudaine et forte de la pression interne dans la cage thoracique, ce qui exerce une charge supplémentaire sur le sternum. Les patientes doivent pouvoir contrer cette pression pour stabiliser le sternum et garantir une cicatrisation sûre. QualiBra Advanced est équipée de poignées intégrées dans la bande thoracique, spécialement conçues pour offrir ce soutien facilement.

## Comment ça fonctionne ?

QualiBra Advanced offre le seul soutien combinant deux fonctions importantes :

1. **Renforcement latéral constant du sternum combiné au soutien de la poitrine**
2. **Poignées intégrées** pour un soutien actif lors de la toux, des éternuements et de la poussée

## Pourquoi choisir QualiBra Advanced ?

- Soulage la douleur et favorise une respiration profonde
- Aide à prévenir les complications, telles que les infections ou la déhiscence de la plaie
- Confortable à porter jour et nuit, même pendant de longues périodes
- Favorise une récupération plus rapide et un séjour hospitalier plus court

QualiBra Advanced est la solution cliniquement validée pour des soins post-opératoires sûrs après une chirurgie cardiaque – spécialement conçue pour les femmes, en tenant compte de leur anatomie, de leur confort et de leur récupération.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Qualiteam
<b>sku</b>	1607302
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	LPLUS
<b>Taille de bonnet</b>	FF
<b>Type d'emballage</b>	Pièce