

1600983 - CryoPen O+ - paquet - 4 applicateurs - 6x 16g cartouches N2O - 1 pc



Déscription

Comment fonctionne le CryoPen O+ ?

Le CryoPen O+ utilise du gaz N2O qui est appliqué sur la peau à traiter via un applicateur fin avec une pression contrôlée. Cela permet une congélation précise et efficace du tissu indésirable, comme les verrues, fibromes, taches pigmentaires et autres lésions cutanées bénignes. Le tissu sain environnant reste intact, ce qui rend le traitement sûr et efficace.

Étapes d'un traitement :

1. Choisissez l'applicateur approprié pour la zone à traiter.
2. Insérez une cartouche de N2O de 16 g dans le CryoPen O+ et activez l'appareil.
3. Dirigez l'applicateur vers la lésion cutanée et pulvérisez le gaz pendant quelques secondes.
4. Répétez si nécessaire, en fonction de la taille et de la profondeur de la lésion.

Que contient le kit de démarrage ?

- **Appareil CryoPen O+** : Instrument de précision pour la cryothérapie.
- **4 applicateurs** : Différentes tailles pour divers types de lésions cutanées.
- **6 cartouches N2O de 16 g** : Prêtes à l'emploi immédiatement.
- **Manuel d'utilisation** : Instructions détaillées pour une utilisation sûre et efficace.

Pourquoi investir dans le CryoPen O+ ?

- **Sécurité** : Conforme aux directives médicales européennes (MDD 93/42/CEE - Classe IIb).
- **Économies** : Aucun coût d'entretien supplémentaire.
- **Résultats professionnels** : Idéal pour les cabinets médicaux souhaitant proposer une cryothérapie fiable.
- **Praticité** : Design compact et portable, parfait pour les cliniques comme pour les traitements mobiles.

Questions fréquentes

Pour quelles affections le CryoPen O+ peut-il être utilisé ?

Le CryoPen O+ convient au traitement de diverses lésions cutanées bénignes, telles que verrues, taches de vieillesse, fibromes, taches pigmentaires et autres petites anomalies dermatologiques.

Combien de traitements peut-on réaliser avec une cartouche de N2O ?

Une cartouche de 16 g suffit pour plusieurs traitements, en fonction de la taille et du nombre de lésions traitées.

Faut-il une formation spéciale pour utiliser le CryoPen O+ ?

Le CryoPen O+ est conçu pour une utilisation simple et ne nécessite pas de formation approfondie. Une instruction de base et le manuel fourni suffisent pour commencer.

Spécifications

Marque	H&O Equipments
Cartouches incluses	6x 16g cartouches N2O
sku	1600983
Normes	ISO 13485:2016
Applicateurs inclus	Blanc/rouge (2 - 6 mm) Bleu/rouge (1 - 3 mm) Jaune/rouge (7 - 20 mm) Vert/rouge (4 - 8 mm)
Catégorie cryothérapie	Cryopen
Convient pour	Cartouches 8g N2O Cartouches 16g N2O
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Utilisateurs	Dermatologues Généralistes Podologues Pédiatres
Utilisation	Utilisation régulière