

1576410 - ComfyBelly met cover - extralarge - 1 st



Beschrijving

Voor ondersteuning van de ontwikkeling van uw baby

Over de ComfyBelly:

De ComfyBelly is ontwikkeld om de buikligging van zieke en pre-term geboren baby's te ondersteunen in het ziekenhuis. De ComfyBelly draagt bij aan een natuurlijke afronding van de schouders en bevordert de mogelijkheid tot hand-mond coördinatie en middellijn-oriëntatie. Dit zijn belangrijke componenten ter ondersteuning van de ontwikkeling van baby's.

Bij gebruik van de ComfyBelly worden de benen van het kind met het bekken naar voren gekanteld en bevordert het de flexie van de ledematen zonder overmatige druk op knieën en ellebogen.

Het gebruik van de ComfyBelly:

- Positioneer de ComfyBelly onder hoofd en romp.
- Niet lager dan de navelhoogte en niet breder dan de romp.
- Zorg dat de schouders licht gebogen en ondersteund.
- Zorg dat de benen zijn opgetrokken.
- Zorg dat de baby gesteund wordt door de randen van het -
- ComfyNest of Boundy. (ook te vinden op onze website)

Praktische informatie van het Benjamin ComfyNest:

- De ComfyBelly is verkrijgbaar in vier maten: Small (500 - 1500 gram), Medium (1500 - 2500 gram), Large (2500 - 4000 gram) en Extra Large (4000 - 5500 gram).
- De stoffen hoes is gemaakt van technisch textiel.
- Het binnen gedeelte is afneembaar volgens ziekenhuisprotocol.
- De ComfyBelly is wasbaar op 60-95° en is geschikt voor drogen in de droogtrommel.
- De ComfyBelly is bruikbaar in combinatie met het ComfyNest of Boundy.

Specificaties

Merk	Benjamin Care
SKU leverancier	CB-007-000-XL
sku	1576410
Maat	XL
Type verpakking	Stuk