

1603708 - Z1 Utility Positioner Small - 1 st



Beschrijving

Het positioneren en, nog belangrijker, herpositioneren van de patiënt wordt aanbevolen als onderdeel van een succesvol decubituspreventieprotocol. 1 De Mölnlycke® Z-Flo™ gefluïdiseerde positioners bieden de mogelijkheid om zich op unieke wijze aan te passen aan het lichaam van de patiënt en deze te ondersteunen in een comfortabele positie totdat het tijd is om opnieuw te positioneren.

Z-Flo Gefluïdiseerde Positioners worden gebruikt om de kracht over een groter oppervlak te verdelen of om botuitsteeksels te ontlasten met behoud van een neutrale uitlijning van het lichaam. In tegenstelling tot zitzakpositioners en kussens zijn deze unieke gefluïdiseerde positioners niet onderhevig aan het effect van zwaartekracht of geheugen. Eenmaal gevormd om te voldoen aan de anatomische behoeften van een individuele patiënt, behouden ze die vorm tot ze opnieuw gevormd worden en zijn ze verkrijgbaar in verschillende maten.

Z-Flo positioners kunnen worden gebruikt om het achterhoofd te helpen beschermen door druk te herverdelen terwijl het hoofd en de nek goed uitgelijnd blijven. Je kunt ook gemakkelijk ruimte vormen om de oren te beschermen of om kanalen te maken voor medische hulpmiddelen. Andere gebieden die gebruikt kunnen worden zijn de schouders, rug, heupen, knieën en enkels om een zijligpositie te ondersteunen. In plaats van kussens of andere geïmproviseerde hulpmiddelen te gebruiken, kunt u Z-Flo positioners gebruiken om hielen te laten zweven of te ontlasten voor een patiënt in rugligging.

Specificaties

Merk	Mölnlycke
sku	1603708
Type verpakking	Stuk