

## 1600983 - CryoPen O+ - startpakket - 4 applicatoren - 6 x 16g N2O patronen - 1 st



### Beschrijving

#### Hoe werkt de CryoPen O+?

De CryoPen O+ werkt met N2O-gas dat via een fijne applicator met gecontroleerde druk op de te behandelen huid wordt aangebracht. Dit zorgt voor een nauwkeurige en effectieve bevroering van het ongewenste weefsel, zoals wratten, fibromen, pigmentvlekken en andere goedaardige huidletsels. Het gezonde omliggende weefsel blijft onaangetaast, waardoor de behandeling veilig en efficiënt is.

#### Stappen van een behandeling:

1. Kies de juiste applicator voor het te behandelen gebied.
2. Plaats een 16g N2O-patroon in de CryoPen O+ en activeer het apparaat.
3. Richt de applicator op het huidletsel en spuit het gas gedurende enkele seconden.
4. Herhaal indien nodig, afhankelijk van de grootte en diepte van het letsel.

#### Wat zit er in het startpakket?

- **CryoPen O+ apparaat:** Precisie-instrument voor cryotherapie.
- **4 applicatoren:** Verschillende maten voor diverse huidletsels.
- **6 N2O-patronen van 16g:** Direct klaar voor gebruik.
- **Handleiding:** Gedetailleerde instructies voor veilig en effectief gebruik.

#### Waarom investeren in de CryoPen O+?

- **Veiligheid:** Voldoet aan de Europese medische richtlijnen (MDD 93/42/EEC - Klasse IIb).
- **Kostenbesparend:** Geen bijkomende onderhoudskosten
- **Professionele resultaten:** Ideaal voor medische praktijken die betrouwbare cryotherapie willen aanbieden.

- **Gemak:** Compact en draagbaar ontwerp, perfect voor zowel klinieken als mobiele behandelingen.

## Veelgestelde vragen

### Voor welke aandoeningen kan de CryoPen O+ worden gebruikt?

De CryoPen O+ is geschikt voor het behandelen van diverse goedaardige huidletsels, zoals wratten, ouderdomsvlekken, fibromen, pigmentvlekken en andere kleine dermatologische afwijkingen.

### Hoeveel behandelingen kan ik uitvoeren met een N2O-patroon?

Eén patroon van 16g is voldoende voor meerdere behandelingen, afhankelijk van de grootte en het aantal letsels dat wordt behandeld.

### Is er speciale training nodig om de CryoPen O+ te gebruiken?

De CryoPen O+ is ontworpen voor eenvoudig gebruik en vereist geen uitgebreide training. Een basisinstructie en de meegeleverde handleiding zijn voldoende om aan de slag te gaan.

## Specificaties

<b>Merk</b>	H&O Equipments
<b>Patronen inbegrepen</b>	6x 16g N2O patronen
<b>sku</b>	1600983
<b>Normeringen</b>	ISO 13485:2016
<b>Applicatoren inbegrepen</b>	Blauw/rood (1 - 3 mm) Geel/rood (7 - 20 mm) Groen/rood (4 - 8 mm) Wit/rood (2 - 6 mm)
<b>Categorie cryotherapie</b>	Cryopen
<b>Compatibel met</b>	8g N2O patronen 16g N2O patronen
<b>Gebruik</b>	Regelmatig gebruik
<b>Gebruikers</b>	Dermatologen Huisartsen Kindergeneeskunde Podologen
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk