
GEBRUIKERSHANDLEIDING

Benjamin Boundy



Voorwoord

Bedankt voor de aanschaf van de Benjamin Boundy. Deze handleiding bevat alle benodigde informatie om snel vertrouwd te raken met het product. Wij verzoeken u vriendelijk om deze informatie zorgvuldig door te nemen, alvorens met het product te gaan werken. Deze handleiding hoort bij de bijgeleverde instructiekaart.

Deze informatie is bestemd voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg. Samen met de ouders/verzorgers kunt u zich vertrouwd maken met de toepassing van de Benjamin Boundy. U dient deze handleiding volledig te lezen en te begrijpen voordat u het product gaat gebruiken. In deze gebruikersinstructie wordt vermeld hoe u de Benjamin Boundy veilig kunt gebruiken in het ziekenhuis.

Studies hebben aangetoond dat begrenzing een bewezen positief effect op de ademhaling, pijn, kwaliteit van de slaap en de emotionele rust. Ook de neurologische ontwikkeling wordt door de juiste positionering positief beïnvloed.

De Benjamin Boundy is een hulpmiddel die een bijdrage levert aan de ondersteuning, positionering en begrenzing van zieke baby's. De Benjamin Boundy is ontwikkeld in samenwerking met NIDCAP getrainde specialisten en volgt de nieuwste inzichten op het gebied van Ontwikkelingsgerichte Zorg.

Dit is de oorspronkelijke handleiding. Bewaar deze handleiding goed!

Voor meer informatie of het bestellen van handleidingen, neem contact op met:

Benjamin Care
Utrechtseweg 317
3731 GA De Bilt
Nederland
Telefoon: +31307371114
E-mail: info@benjamincare.nl
www.benjamincare.nl

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	6
1.1	Bedoeld en onbedoeld gebruik	6
1.2	Beperking van aansprakelijkheid	6
1.3	Gebruikte symbolen	7
2.	Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies	8
3.	Productspecificaties	9
3.1	Classificatie	9
3.2	De Benjamin Boundy	9
4	Gebruik	11
4.1	Vorbereiding	11
4.2	De baby positioneren en ondersteunen	11
4.3	De baby uit de Benjamin Boundy halen	12
5	Wasvoorschriften	13
6	Onderhoud	13
7	Garantie	13

1. Inleiding

1.1 Bedoeld en onbedoeld gebruik

De Benjamin Boundy is een hulpmiddel wat geschikt is om de baby te ondersteunen en in diverse houdingen te positioneren en te begrenzen. Het is speciaal ontwikkeld voor de a-terme zieke baby en geschikt voor de rijpere prematuur die het nest ontgroeid is maar behoefte heeft aan bescherming en ondersteuning. Benjamin Boundy biedt de mogelijkheid om de baby in een middellijn-oriëntatie te positioneren. Deze middellijn-oriëntatie bevordert hand-mondcontact en hand-handcontact, waardoor de baby zich prettiger zal voelen en beter in staat is tot zelfregulatie. Door het vrijlaten van de handjes, is de baby in staat spontaan het gezicht aan te raken.

De Benjamin Boundy en de accessoires mogen alleen gebruikt worden onder monitorbewaking en onder constant medisch toezicht op de neonatologieafdeling of kinderafdeling.

De Benjamin Boundy dient niet gebruikt te worden:

- in de thuissituatie (vanwege de mogelijk verhoogde kans op wiegendood bij het toepassen van positioneringshulpmiddelen in de wieg);
- bij baby's die kleiner zijn dan 2500 gram;
- bij het maken van een röntgenfoto. (Bij een laterale opname de binnenrol verwijderen. De foto kan door de inhoud van de binnenrol onscherp worden. Bij een posterieure-antérieure (PA) opname is dit niet nodig.)
- bij baby's die bezig zijn met de overgang om naar huis te gaan.

Ieder ander gebruik dan beschreven in deze handleiding wordt gezien als oneigenlijk gebruik.

1.2 Beperking van aansprakelijkheid



Als het product wordt gebruikt op een manier die niet voldoet aan het beoogd gebruik, wordt de aansprakelijkheid (ongeacht of die voortkomt uit of in verband met de productie en verkoop van de goederen, demonstratie-, verkoop-vertegenwoordiging, het gebruik, de prestaties, of anderszins, inclusief enige aansprakelijkheid op basis van Benjamin Care's productgarantie) voor het correct functioneren van het product permanent overgedragen aan de eigenaar of gebruiker.

Benjamin Care kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door:

- niet naleven van de aanbevelingen zoals beschreven in deze handleiding,
- oneigenlijk, verkeerd of onverstandig gebruik.

Gebruikers van de Benjamin Boundy moeten hun verantwoordelijkheid erkennen voor het toepassen van geschikte bewaking van de conditie van de patiënt. Dit kan gebeuren door middel van elektronische bewaking van de patiënt en door observatie. Verantwoordelijkheid voor het selecteren van het juiste niveau van bewaking ligt enkel bij de gebruiker.

1.3 Gebruikte symbolen

Symbol	Verklaring
 WAARSCHUWING	Een waarschuwing verwijst naar het risico op persoonlijk letsel indien de aanwijzing niet wordt opgevolgd.
 VOORZICHTIG	Voorzichtig wordt gebruikt voor het aanduiden van de mogelijkheid op schade aan het product als de aanwijzing niet wordt opgevolgd.
LET OP	Een let op biedt aanvullende informatie met als doel ongemakken tijdens het gebruik te voorkomen.

2. Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies

- Lees en begrijp deze handleiding volledig voor ieder gebruik.
- De Benjamin Boundy mag alleen gebruikt worden zoals beschreven in paragraaf 1.1 Bedoeld en onbedoeld gebruik.
- De Benjamin Boundy mag alleen gebruikt worden onder monitorbewaking en onder constant medisch toezicht op de neonatologieafdeling en kinderafdeling door gekwalificeerd medisch personeel, dat op de hoogte is van de actueel bekende risico's en voordelen van het gebruik van het product.
- Gebruik de Benjamin Boundy als hulpmiddel om een comfortabele houding te realiseren en bij te dragen aan het bieden van begrenzing, rekening houdend met conditie en leeftijd van de baby.
- Controleer de temperatuur van de baby regelmatig wanneer de baby in de Benjamin Boundy ligt. Positioneringshulpmiddelen kunnen invloed hebben op de temperatuur van de baby. Kinderen met oververhitting die gebruik maken van de Benjamin Boundy dienen extra goed gemonitord te worden, bij voorkeur met een huidtemperatuursensor.
- Prik nooit met naalden of andere scherpe voorwerpen in de Benjamin Boundy. Dit zou de binnenrol kunnen beschadigen zodat de vulling in contact zou kunnen komen met de baby.
- Het strikt naleven van de geldende hygiënevoorschriften is noodzakelijk om infecties te voorkomen. Dit betekent in ieder geval dat alle onderdelen voor gebruik gereinigd en zorgvuldig gedroogd dienen te worden en er elke dag schone hoezen worden gebruikt.
- Verwijder de Benjamin Boundy bij het maken van röntgenfoto's.
- Verwijder de Benjamin Boundy geleidelijk naar mate de baby naar huis mag, maak hiervoor gebruik van het ziekenhuisprotocol. Het is belangrijk dat ouders en kind gewend raken aan het liggen in een wieg zonder positioneringshulpmiddelen, die in een thuissituatie niet gebruikt mogen worden vanwege mogelijke verhoging van de kans op wiegendood.
- Bij beschadiging of onverwijderbare vlekken de Benjamin Boundy nooit gebruiken.

3. Productspecificaties

3.1 Classificatie

De Benjamin Boundy is geen medisch hulpmiddel omdat het slechts wordt ingezet voor het comfort van de baby. Dit product is niet bedoeld voor diagnostische en/of therapeutische doeleinden zoals bedoeld in artikel 1.lid 2 van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG.

Dit product voldoet aan de CEN/TS 142372015 Textiles for healthcare and social services facilities.

3.2 De Benjamin Boundy

De Benjamin Boundy bestaat uit een waterafneembare binnenrol, gevuld met korrels, en een losse, wasbare hoes. De flexibele en soepele binnenrol van de Benjamin Boundy maakt het mogelijk de rol zo te vormen dat de baby in elke houding goed ondersteund kan worden.

De Benjamin Boundy is beschikbaar in één maat en geschikt voor baby's in de gewichtsklasse 2500-5000 gram.

Productnaam	Benjamin Boundy
Fabrikant	Benjamin Care
Materiaal	97% DriRelease, 82% polyester, 15% katoen, 3% elastaan

De uiteinden van de Benjamin Boundy zijn bedoeld om de baby te ondersteunen waar nodig en optimaal te positioneren. Het kan worden geplaatst rond het hoofd, nek of heupen of onder of tegen een armpje of beentje worden gelegd. Voor buikligging en de rugligging wordt geadviseerd om 2 Benjamin Boundy's te gebruiken om voldoende begrenzing te kunnen bieden. In rugligging, kunnen de uiteinden worden gebruikt om het hoofd in de juiste positie te brengen.

De uiteinden van de Benjamin Boundy kan ook als een extra 'hand' kortdurend op de baby worden gelegd tijdens procedures om voor begrenzing van boven te zorgen.



4. Gebruik

4.1 Voorbereiding

- Reinig en droog de binnenrol en buitenhoes zorgvuldig voor elk gebruik volgens de instructies in hoofdstuk 5.
- Controleer voor elk gebruik of de binnenrol intact is zonder gaten, scheuren, losse draden en onverwijderbare vlekken.
- Schuif de binnenrollen in de bijbehorende hoes en sluit de openingen met de druk knopen
- Leg de Benjamin Boundy's alvast in het bed zodat ze de juiste temperatuur kunnen aannemen.

4.2 De baby positioneren en ondersteunen

1. Weeg de baby voor gebruik en kies afhankelijk van het gewicht voor de Benjamin Boundy.
2. Controleer de temperatuur van de baby voordat het in de Benjamin Boundy wordt geplaatst om alert te zijn op temperatuurschommelingen
3. Licht de ouders in over het gebruik en doel van de Benjamin Boundy. Gebruik de instructiekaart hierbij als ondersteuning.
4. Positioneer de baby in buik-, zij- of rugligging. Raadpleeg de desbetreffende illustratie op de Benjamin Boundy instructiekaart.
5. De Benjamin Boundy dient begrenzing te geven maar mag de baby niet beperken in zijn/haar spontane bewegingen.

Zorg ervoor dat:

- het hoofd altijd in één lijn ligt met de romp;
- de voetjes altijd tegen de onderrand steunen;
- in het geval van zijligging, de baby zo ligt dat mond-hand contact mogelijk is;
- in het geval van zijligging, de rug van de baby tegen de rand van de Benjamin Boundy ligt;
- in het geval van rugligging, de baby gesteund wordt door de randen van bij voorkeur 2 Benjamin Boundy's en de handjes bij elkaar kunnen zijn.
- in geval van buikligging de ademhaling vrij is en bij voorkeur 2 Benjamin Boundy's aan beide zijdes de baby ondersteunen.

⚠ WAARSCHUWING	De Benjamin Boundy mag nooit tegen het gezicht van de baby liggen omdat dit de ademhaling van de baby zou kunnen belemmeren en tot verstikking zou kunnen leiden.
⚠ WAARSCHUWING	De Benjamin Boundy mag nooit op de borst of buik van de baby liggen omdat dit de ademhaling kan belemmeren.
⚠ WAARSCHUWING	De Benjamin Boundy kan voor baby's te zwaar zijn. Gebruik de uiteinden alleen kortdurend bovenop een lichaamsdeel van de baby en ga voor gebruik altijd na of de Benjamin Boundy geschikt is voor de baby.
LET OP	Gebruik de Benjamin Boundy als onderdeel van een wisselingschema volgens het ziekenhuisprotocol.

4.3 De baby uit de Benjamin Boundy halen

1. Ondersteun de baby wanneer de Benjamin Boundy voorzichtig wordt verwijderd. Verwijder de Benjamin Boundy's niet tegelijkertijd, maar één voor één.

5. Wasvoorschriften

De Benjamin Boundy bestaat uit twee delen: een met korrels gevulde binnenrol en een beschermhoes. De hoes van de Benjamin Boundy is gemaakt van een geavanceerde technische stof die bestaat uit een mix tussen polyester en katoen. Deze stof droogt het vier keer zo snel als katoen en blijft geurvrij.

Geadviseerd wordt om de buitenhoes dagelijks te verschonen of vaker wanneer deze zichtbaar vuil is.

De hoezen kunnen in de wasmachine op 60 graden gewassen worden. Wassen op 90 graden is ook mogelijk, maar dit zal de levensduur van de hoezen wel verkorten. De hoezen mogen niet gestreken worden.

De binnenrollen heeft een oppervlakte van waterafneembaar materiaal, en kan volgens ziekenhuisprotocol schoongemaakt worden. Eventueel kan ook de binnenrol in de wasmachine op 90 graden gewassen worden. Na het wassen de binnenrol drogen in de droogtrommel op het langste droogprogramma genaamd extra droog of zeer droog. Dit voorkomt dat de vulling ongemerkt vochtig blijft, met mogelijk hygiëneproblemen tot gevolg. Raadpleeg dus altijd de hygiëneafdeling van het ziekenhuis alvorens de binnenrol in de wasmachine te wassen en te drogen in droogtrommel.

6. Onderhoud

Controleer de Benjamin Boundy regelmatig op eventuele losse naden, gaten, scheuren, losse draden en onverwijderbare vlekken. Gebruik het product in dit geval niet.

7. Garantie

Benjamin Care biedt een beperkte garantie van 6 maanden op productie en materiaalfouten, onder voorwaarde dat het product op normale wijze is gebruikt. Elke schade die ontstaat door abnormaal gebruik, onjuist hanteren, reinigen of nalatigheid, valt niet onder de garantie.

