

Wiegand AG

Formation produit – nouveau système de distribution des médicaments

vendredi, 20 février 2026


Agenda

- Système de distribution des médicaments — Hier — Aujourd'hui — Demain
- Motivations & bases de décision
- Objectifs
- Compatibilité
- Évolution plutôt que révolution — quelles modifications / améliorations ont été apportées
- Aperçu de la gamme
- Formation produit
- Calendrier
- Questions



Systeme de distribution des médicaments

En 1968, le premier MediDispenser a été lancé. Depuis, la gamme de produits de Wiegand AG s'est fortement développée.

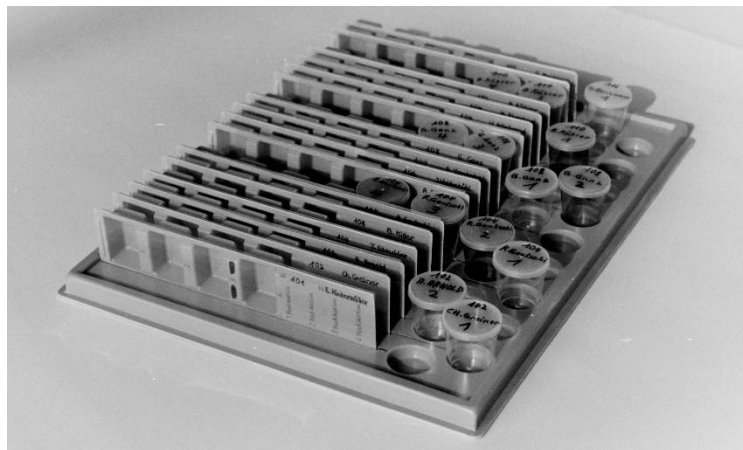

1968



1975



Aujourd'hui

Après plus de 50 ans, il est temps de franchir la prochaine étape d'évolution.

Motivations & bases de décision

Nos motivations:

- Évolution des exigences du marché et retours des partenaires
- Développement technique continu et optimisation des matériaux
- Objectif: simplification, différenciation et avantage concurrentiel

Nos bases de décision:

- Analyses de marché et observations terrain
- Collaboration étroite avec les utilisateurs, un groupe d'experts des domaines des soins et de la pharmacie ainsi que des partenaires d'exportation

Nos résultats:

- Les MediDispenser et les solutions système restent pertinents et tournés vers l'avenir
- L'importance de la durabilité augmente
- Des domaines d'optimisation clairs ont été identifiés (p. ex. couvercles coulissants)

Objectifs

Lors du développement du nouveau système de distribution des médicaments, les objectifs suivants étaient au centre de nos priorités :

- Compatibilité avec les produits et solutions existants
- Plus de flexibilité au sein du système
- Amélioration de la manipulation, de la qualité et de la logistique






Compatibilité

Les nouveaux MediDispenser sont compatibles avec la gamme existante, avec certaines limitations.

- Verteiltablets können weiterhin verwendet werden
- Les plateaux de distribution peuvent continuer à être utilisés
- Les plateaux de stockage et plateaux hebdomadaires peuvent continuer à être utilisés, avec les limitations suivantes:
 - Les nouveaux MediDispenser présentent davantage de jeu sur les anciens plateaux
 - Les anciens MediDispenser ne sont pas compatibles avec les nouveaux plateaux
- Le stockage dans des armoires à parois profilées reste possible



Produits sans remplacement (pour l'instant)

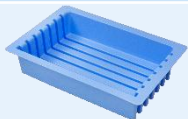Image	Article	Motif
	MediDispenser 131/139 incl. plateau de stockage	Ventes principalement à l'export, seulement quelques clients en Suisse
	Récipients hebdomadaires pour 91 pour 11/19, incl. couvercles coulissants	Plus compatible avec les nouveaux MediDispenser
	Récipients hebdomadaires pour 191 pour 41/49, 61/69	Plus compatibles avec les nouveaux MediDispenser
	Solutions de suivi pour le transport des MediDispenser en cours de développement (solution externe)	Plus compatibles avec les nouveaux MediDispenser / plateaux de stockage
	TransportBox	Plus compatible avec les nouveaux MediDispenser / plateaux de stockage
	Plateau hebdomadaire pour MediDispenser 271/279 et 281/289	Plus de systèmes 8 compartiments dans la gamme — MediDispenser disponibles dans une taille comparable

Wiegand AG

Évolution plutôt que révolution

Pourquoi Wiegand ?

Groupe cible: Krankenhäuser, Alters- und Pflegeeinrichtungen, ambulante Dienste und Kliniken

Fonction & utilisation:



1. Préparation des médicaments



2. Stockage & organisation



3. Distribution & administration

Avantages du système Wiegand:

- Approche système standardisée avec une grande compatibilité et évolutivité
- Grande flexibilité et large gamme de produits
- Adaptable aux différentes exigences thérapeutiques
- Développé pour les processus réels de soins et cliniques
- 50 ans d'expérience avec les utilisateurs finaux dans le secteur de la santé

Améliorations générales

- Material: Alle Dispenser Bestandteile, inkl. Schiebedeckel, bestehen aus recyclebarem Polypropylen (PP)
- Matériau: Tous les composants du dispenser, y compris les couvercles coulissants, sont fabriqués en polypropylène (PP) recyclable
- Procédé de fabrication : moulage par injection — pièces plus précises permettant des caractéristiques plus complexes
- Possibilités de combinaison étendues
- Fonctions d'hygiène et de nettoyage optimisées
- Davantage d'options d'impression à moindre coût




Nouveau couvercle coulissant

Matériau & nettoyage: nettoyage amélioré

Manipulation: profil de glissement fluide

Visibilité: positionnement clair pour une distribution sécurisée

Sécurité: la butée soutient l'ordre correct d'administration des médicaments

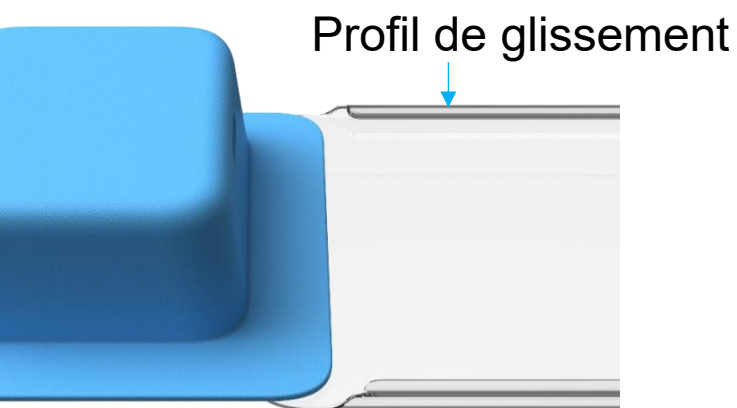


Nouveaux séparateurs

Nettoyage amélioré : les nervures d'emboîtement facilitent le nettoyage

Maintien optimisé : mécanisme d'emboîtement amélioré pour une fixation stable

Optimisation de la gamme : 4 séparateurs couvrent toutes les applications MediDispenser

Standardisation : trame uniforme de 25 mm – flexibilité maximale

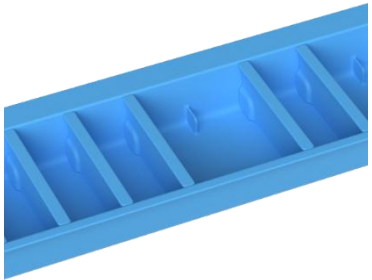

**Nouveau
MediDispenser**
Nervures améliorées et
espacement normalisé.



MediDispenser actuel:
La saleté pouvait
s'accumuler dans les
rainures, rendant le
nettoyage plus complexe.

Nouveaux MediGodets

Simplification de la gamme : Un seul type de MediGodets par dispenser

Nouvelle largeur : Disponible également pour les dispensers larges

Matériau & nettoyage : PP haute qualité, facile à nettoyer

Manipulation : Aide à la préhension et grande stabilité



Couleurs : Transparent, bleu, rouge, jaune et vert

Article	Copmatible avec
MediGodet pour MediDispenser 14X et 16X Numéro d'article 100.148.X	100.140 / 100.142 100.143 / 100.162
MediGodet pour MediDispenser 18X Numéro d'article 100.188.X	100.182



Nouvelles possibilités de combinaison

Les MediGodets s'intègrent dans les MediDispenser correspondants et peuvent être combinés librement. La combinaison de MediGodets et de séparateurs au sein d'un même dispenser est possible. Dans les MediDispenser profonds, les MediGobelets peuvent également être utilisés en position verticale.

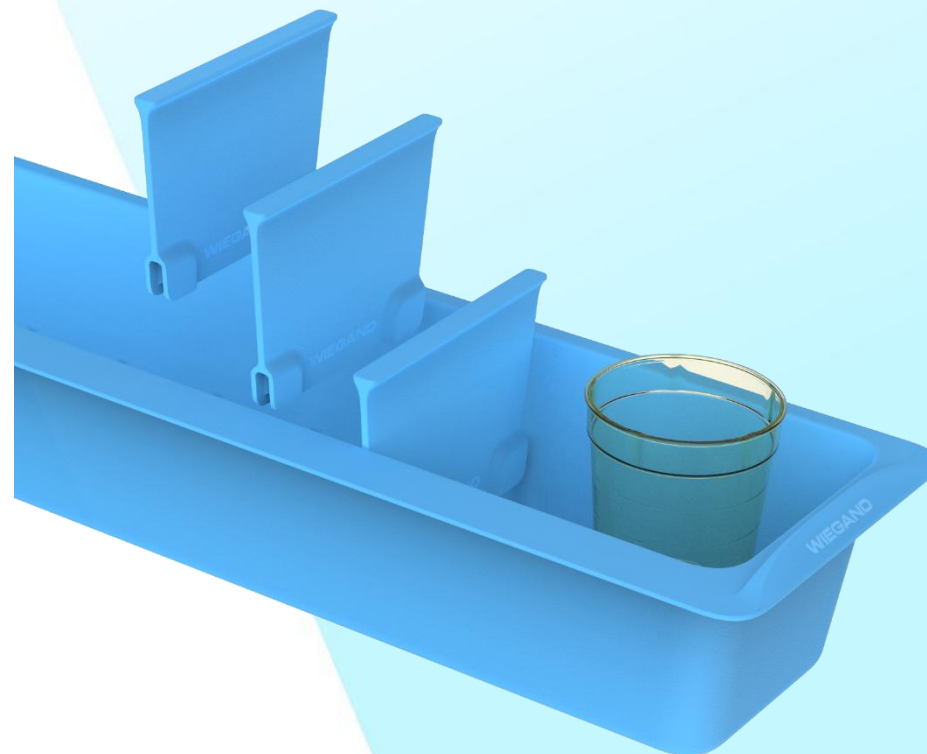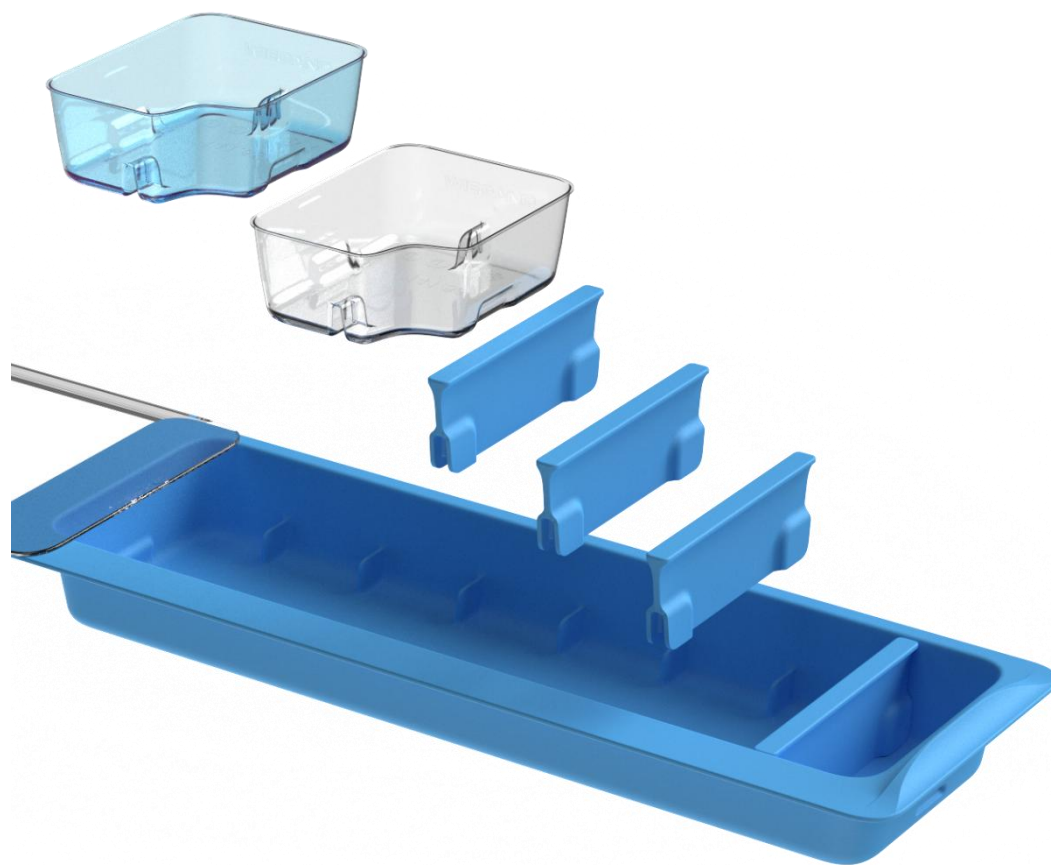

Nouveau MediDispenser

Les MediDispenser sont disponibles en deux profondeurs.






Conditionnement automatisé & identification flexible

Impression & conditionnement entièrement automatisés: Bedrucken, Impression, emballage (7 ou 10 unités avec accessoires), banderolage et rétraction — efficaces et sécurisés.

Impression flexible: Impression personnalisée possible dès une quantité minimale (coûts de setup uniques). Des mises en page standard sont prévues pour les partenaires export.

Moins d'étiquettes, plus d'efficacité: L'impression directe réduit le besoin d'étiquettes → gamme d'étiquettes simplifiée et optimisée.

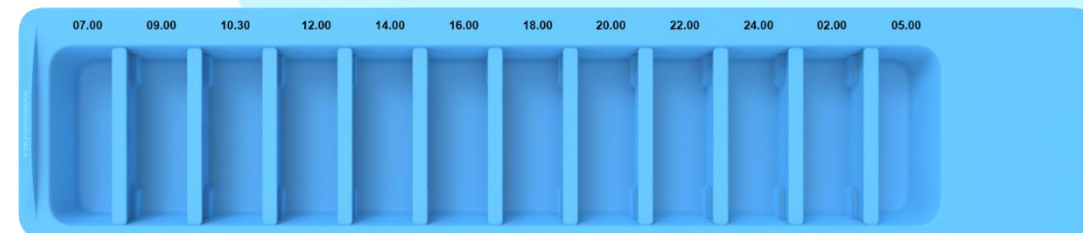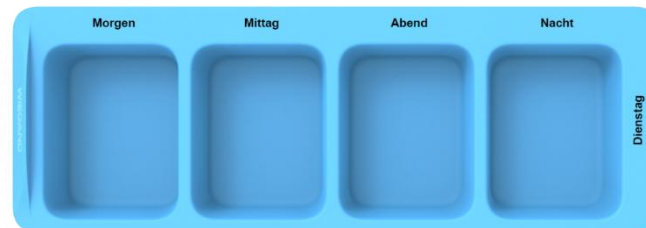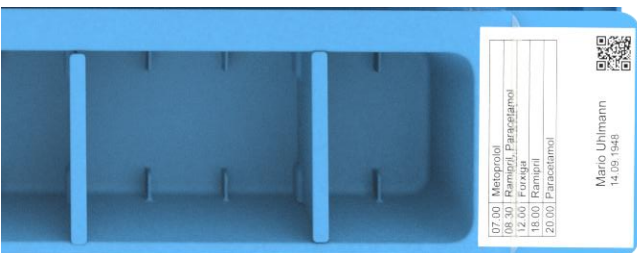


Plateaux de stockage

De nouveaux plateaux de stockage seront également disponibles pour les nouveaux MediDispenser.

- Matériau ABS de haute qualité
- Surface lisse pour un nettoyage simple et hygiénique
- Zone d'étiquetage intégrée
- Grâce à l'adapter clip, compatibles avec MediDispenser plats et profonds



Tous les plateaux de stockage sont compatibles avec les MediDispenser d'une même famille

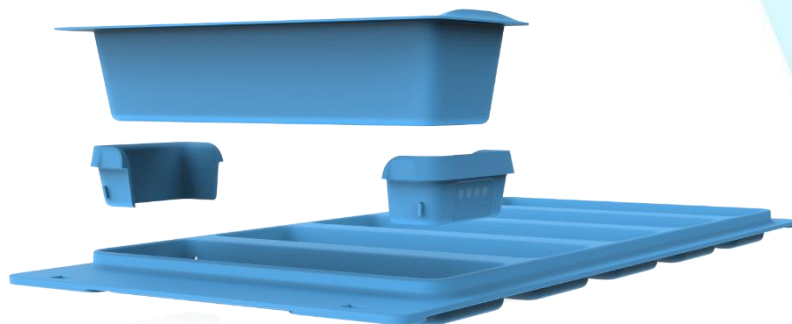

Manipulation simple de l'adapter clip dans le plateau de stockage



Zone d'étiquetage
Dimensions: 10 x 100 mm


Niveau de prix

Un objectif central du développement a été de maintenir des prix stables tout en optimisant certains désavantages de prix existants.

Les prix définitifs ne sont pas encore fixés, mais resteront au niveau actuel et seront communiqués dès que possible.

- Les MediDispensers imprimés deviendront moins chers à l'avenir
- Les emballages de 10 unités seront alignés sur le prix des emballages standard
- Les gains d'efficacité — notamment grâce à l'utilisation du robot d'emballage — permettent ces améliorations

Aperçu de la gamme

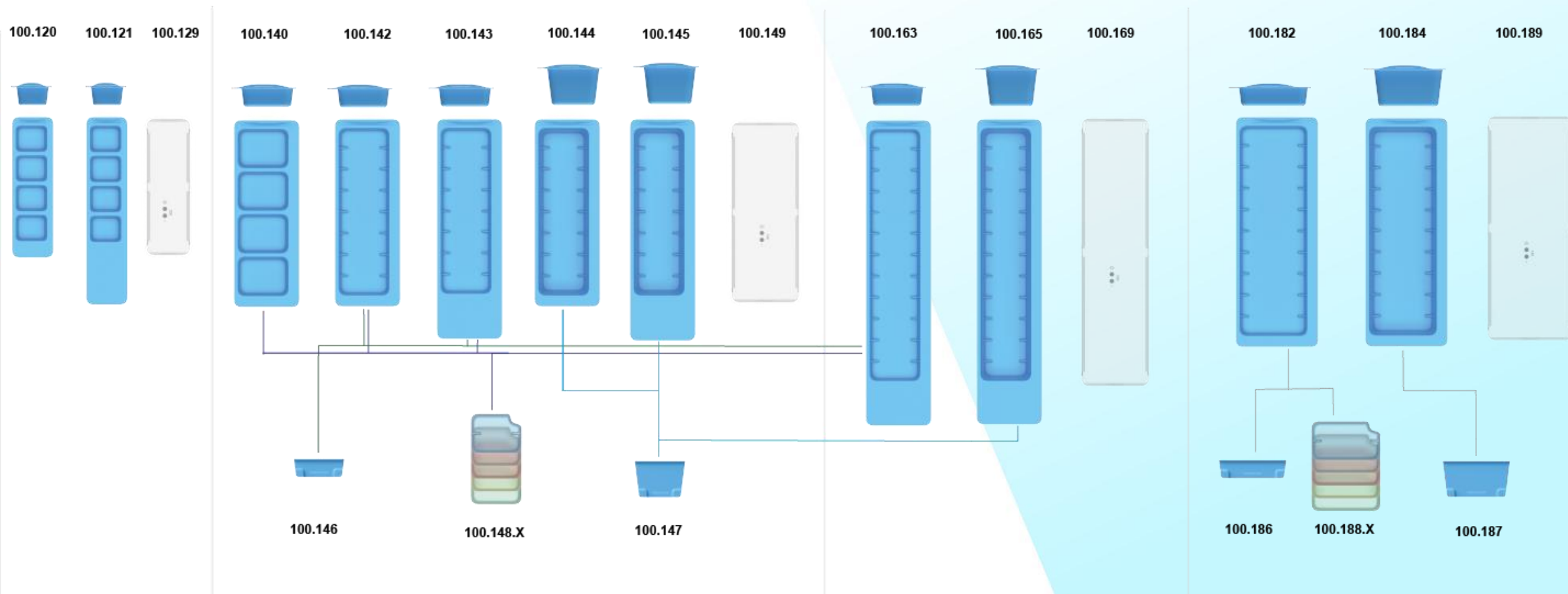




Familles de produits

Famille MediDispenser 14X – Standard

Vue d'ensemble

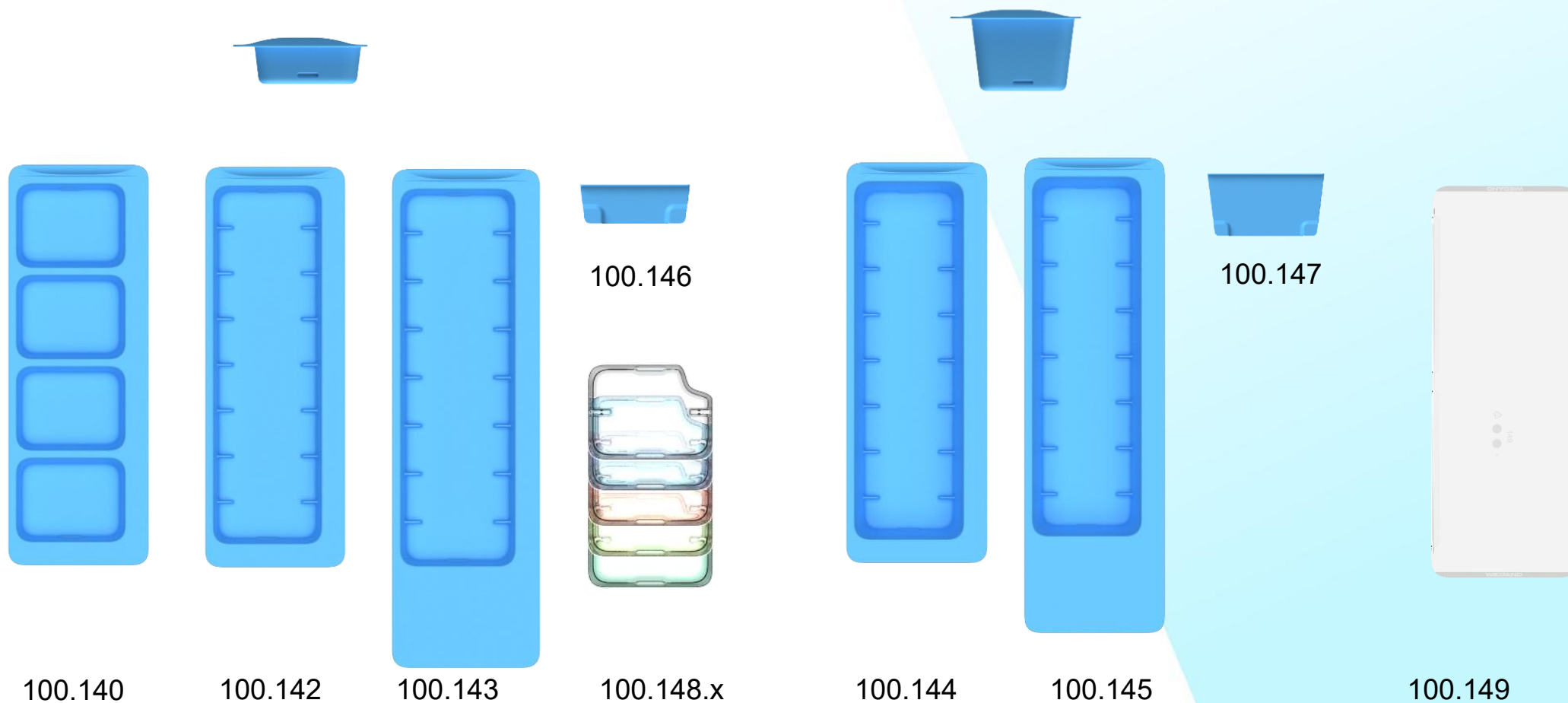

Caractéristiques

Les MediDispenser de la famille 14X constituent le standard et le cœur de la gamme. Ils représentent la solution adaptée à la majorité des applications et offrent les options suivantes:

- MediDispenser à compartiments fixes ou modulables jusqu'à 8 compartiments
- Versions disponibles en profondeur plate ou profonde
- Versions avec ou sans zone d'étiquetage
- Combinables avec MediGodets (plat) ou MediGobelets (profond)
- Stockables dans les chariots FlexLine 45 et 60 ainsi que dans les armoires ISO-B (largeur 600 mm)




Remplacement des produits

Les MediDispenser suivants sont remplacés par de nouveaux produits de la famille 14X:

Article actuel	Nouvel article	Remarque
41/49	100.140	Versions imprimées et sets hebdomadaires toujours disponibles
341/349	100.142	Versions imprimées et sets hebdomadaires toujours disponibles
61/69	100.142	Remplacement équivalent en combinaison avec MediGodets 100.148.X
141/149	100.143	Nouveau MediDispenser offrant le même espace que le 100.142 et divisible en 8 compartiments au lieu de 6


Famille MediDispenser 14X – Vue d'ensemble

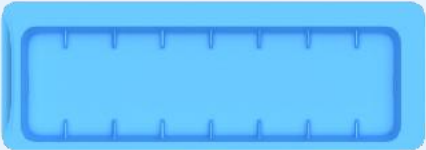Image	Désignation	Caractéristiques	Accessoires
	MediDispenser 140 Numéro d'article. 100.140	Compartimentage: fixe Type: plat Nombre de compartiments: 4 Zone d'étiquetage: non	Couvercle coulissant: 100.149 Séparateurs: – MediGodets: 148.X Plateau de stockage: 150.140.451 / 150.140.601
	MediDispenser 142 Numéro d'article. 100.142	Compartimentage: flexible Type: plat Nombre de compartiments: max. 8 Zone d'étiquetage: non	Couvercle coulissant: 100.149 Séparateurs: 146 MediGodets: 148.X Plateau de stockage: 150.140.451 / 150.140.601
	MediDispenser 143 Numéro d'article. 100.143	Compartimentage: flexible Type: plat Nombre de compartiments: max. 8 Zone d'étiquetage: oui	Couvercle coulissant: 100.149 Séparateurs: 146 MediGodets: 148.X Plateau de stockage: 150.140.452 / 150.140.601
	Nouveau MediDispenser 144 Numéro d'article. 100.144	Compartimentage: flexible Type: profond Nombre de compartiments: max. 8 Zone d'étiquetage: non	Couvercle coulissant: 100.149 Séparateurs: 147 Plateau de stockage: 150.140.451 / 150.140.601 Clip adaptateur: 150.141.200
	Nouveau MediDispenser 145 Numéro d'article. 100.145	Compartimentage: flexible Type: profond Nombre de compartiments: max. 8 Zone d'étiquetage: oui	Couvercle coulissant: 100.149 Séparateurs: 147 Plateau de stockage: 150.140.452 / 150.140.601 Clip adaptateur: 150.141.200

Plateaux de stockage


Pour les MediDispenser de la famille 14X, quatre plateaux de stockage sont disponibles, offrant des options supplémentaires de rangement aux utilisateurs.

- Plateau de stockage pour le rangement et le transport des MediDispenser dans les chariots WIEGAND FlexLine 45
- Plateau de stockage pour le rangement dans les chariots FlexLine 60 ainsi que dans les armoires ISO-B (largeur 600 mm)
- Grâce à l'Adapter-Clip, les plateaux de stockage peuvent être utilisés de manière flexible au sein de la famille
- Remarque : les MediDispenser avec et sans zone d'étiquetage nécessitent des plateaux différents

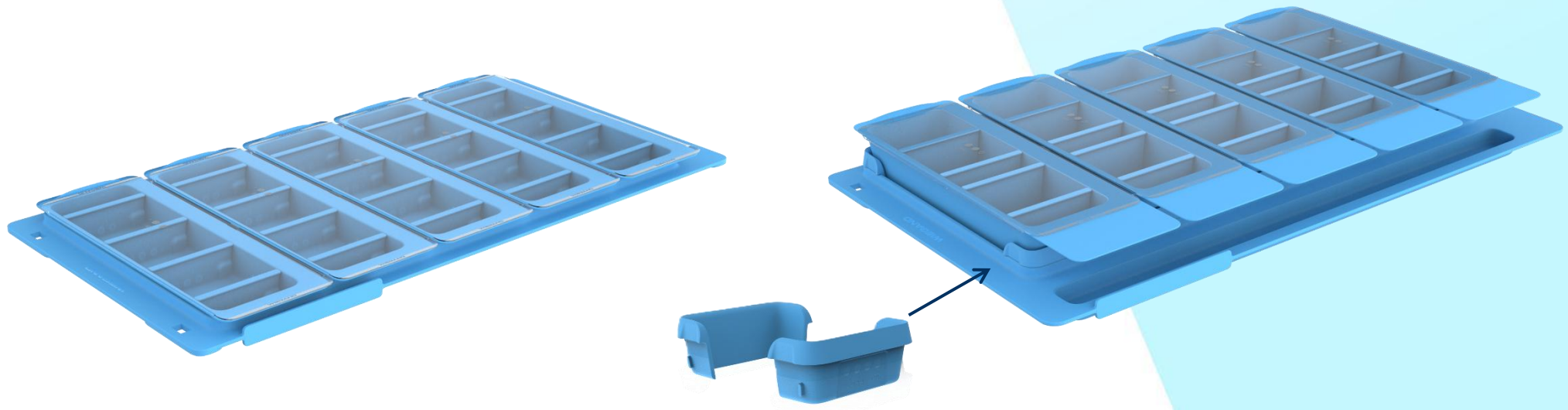

Famille MediDispenser 12X – Compact

Aperçu

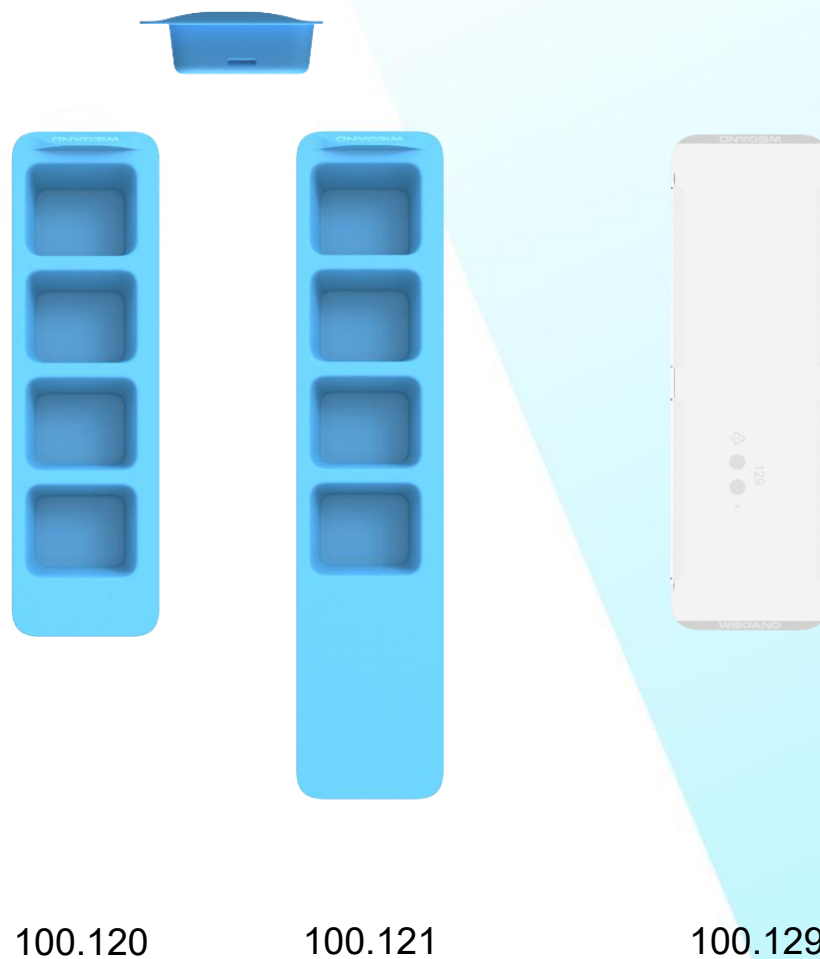

Caractéristiques

Les MediDispenser de la famille 12X offrent aux utilisateurs les options suivantes:

- Fix unterteilte MediDispenser mit 4 Fächern
- MediDispenser à compartiments fixes avec 4 compartiments
- Version plate
- Variante avec ou sans zone d'étiquetage
- Stockage possible dans les chariots FlexLine 45 et 60 ainsi que dans les armoires ISO-B (largeur 600 mm)
- Compatible avec l'insert système existant – comme avec les anciens plateaux de stockage



Remplacement des produits


Les MediDispenser suivants sont remplacés par les nouveaux produits de la famille 12X:

Article actuel	Nouvel Article	Remarque
01/09	100.120	Variante imprimée et sets hebdomadaires disponibles
11/19	100.121	Variante imprimée et sets hebdomadaires disponibles

Famille MediDispenser 12X – Aperçu


Image	Désignation	Caractéristiques	Accessoires
	MediDispenser 120 Numéro d'article: 100.120	Compartmentation: fixe Type: plat Nombre de compartiments: 4 Zone d'étiquetage: non	Couvercle coulissant: 100.129 Plateau de stockage: 291
	MediDispenser 121 Numéro d'article: 100.121	Compartmentation: fixe Type: plat Nombre de compartiments: 4 Zone d'étiquetage: oui	Couvercle coulissant: 100.129 Plateau de stockage: 519

Pour les MediDispenser de la famille 12X, les plateaux hebdomadaires existants peuvent continuer à être utilisés.

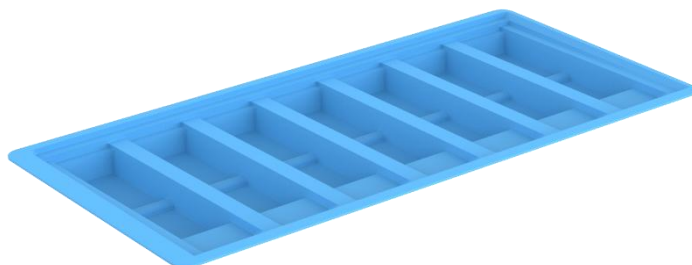

Famille MediDispenser 18X – Large

Aperçu

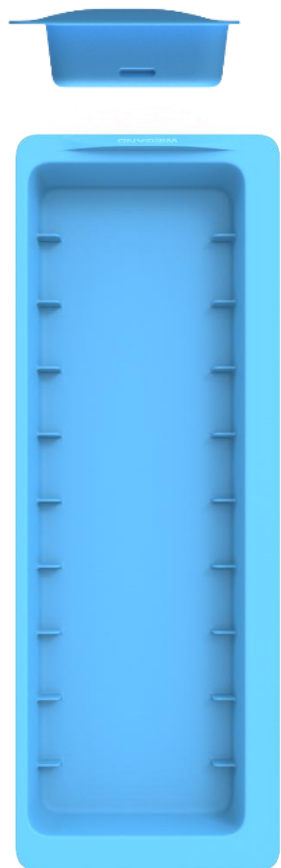


100.182



100.186




100.188.X

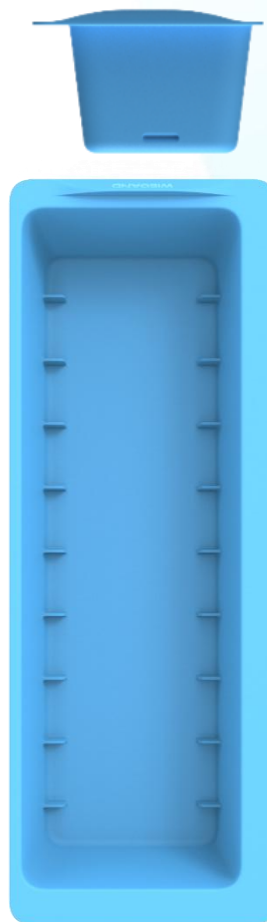

100.184



100.187

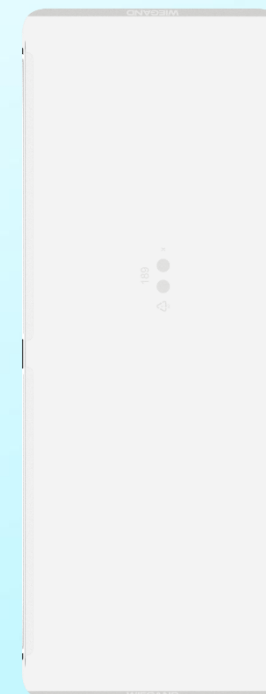


100.189

Caractéristiques

Les MediDispenser de la famille 18X offrent les options suivantes:

- MediDispenser librement compartimentables avec jusqu'à 10 compartiments
- Versions plate et profonde disponibles
- Plus larges que les autres MediDispenser
- Compatibles avec les MediSchalen (version plate) et les MediGobelets (version profonde)


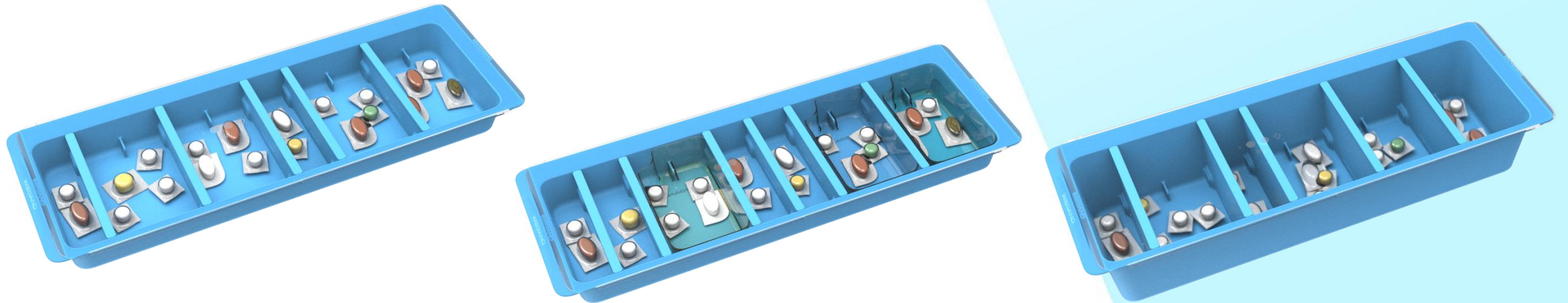


Remplacement de produits

Les MediDispenser suivants sont remplacés par de nouveaux produits de la famille 18X:

Article actuel	Nouvel article	Remarque
151/159	100.184	Remplacement indirect – versions imprimées et sets hebdomadaires disponibles
171/179	100.182	Versions imprimées et sets hebdomadaires disponibles
181/189	100.184	


MediDispenser Famille 18X – Aperçu

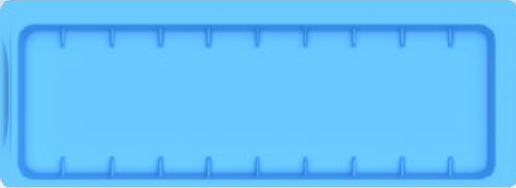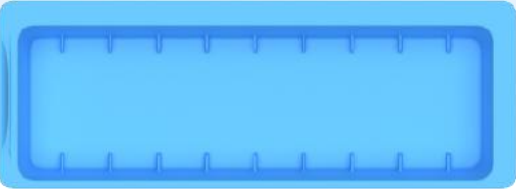Image	Désignation	Caractéristiques	Accessoires
	MediDispenser 182 Numéro d'article: 100.182	Compartmentation : flexible Type : plat Nombre de compartiments : max. 10 Surface d'étiquetage : non	Couvercle coulissant : 100.189 Séparateur : 186 MediGodets : 188.X
	MediDispenser 184 Numéro d'article: 100.184	Compartmentation : flexible Type : profond Nombre de compartiments : max. 10 Surface d'étiquetage : non	Couvercle coulissant : 100.189 Séparateur : 187

Pour les MediDispenser de la famille **18X**, aucun plateau de stockage n'est prévu.

MediDispenser Famille 16X – Long

Aperçu

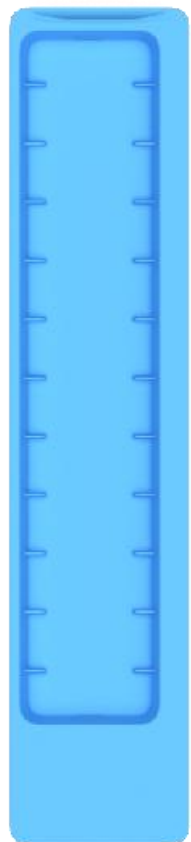

100.163



100.146




100.148.x



100.165



100.147

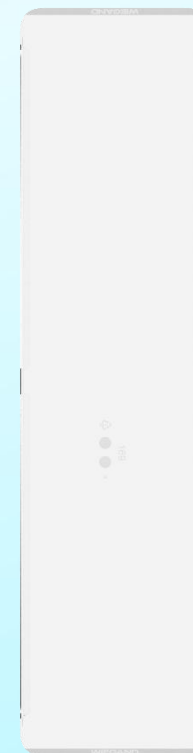


100.169

Caractéristiques

Les MediDispenser de la famille **16X** offrent aux utilisateurs les options suivantes:

- MediDispenser à compartimentation libre avec jusqu'à 12 compartiments
- Versions plates et profondes disponibles
- Avec surface d'étiquetage
- Combinables avec les MediGodets et les MediGobelets
- Stockables dans les chariots FlexLine 60 ainsi que dans les armoires ISO-B (largeur 600 mm)

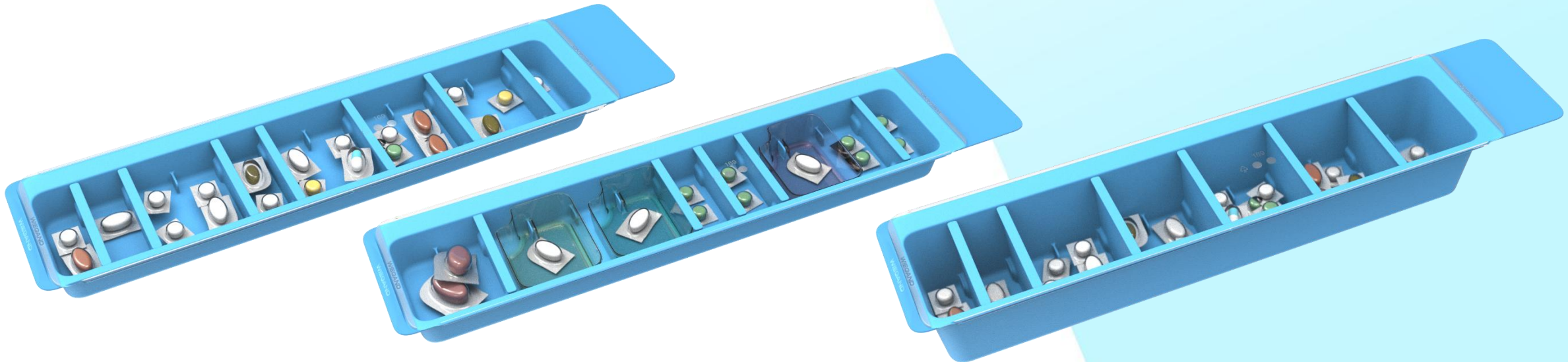


Remplacement de produit

Les MediDispenser suivants sont remplacés par de nouveaux produits de la famille 16X:

Article actuel	Nouvel article	Bemerkung
161/169	100.163	Utilisation avec MediGodets possible
261/269	100.165	


Famille MediDispenser 16X – Aperçu

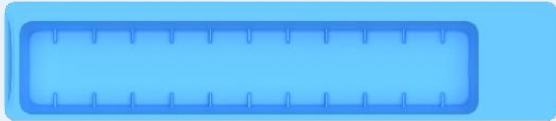Image	Désignation	Caractéristiques	Accessoires
	MediDispenser 163 Numéro d'article 100.163	Compartimentage: flexible Type: plat Nombre de compartiments: max. 12 Zone d'étiquetage: oui	Couvercle coulissant: 100.169 Séparateurs 146 Coupelles Medi: 148.X Plateau de stockage 150.160.601 Clip adaptateur: 150.141.200
	MediDispenser 165 Numéro d'article 100.165	Compartimentage: flexible Type: profond Nombre de compartiments: max. 12 Zone d'étiquetage: oui	Couvercle coulissant: 100.169 Séparateurs: 147 Plateau de stockage: 150.160.601 Clip adaptateur: 150.141.200

Plateaux de stockage



Pour les MediDispenser de la famille 16X, un plateau de stockage est disponible et offre des options de stockage supplémentaires aux utilisateurs.

- Plateau de stockage pour l'utilisation dans les chariots FlexLine 60 ainsi que dans les armoires ISO-B (largeur 600 mm)
- Grâce au clip adaptateur, les plateaux peuvent être utilisés de manière flexible au sein de la famille.

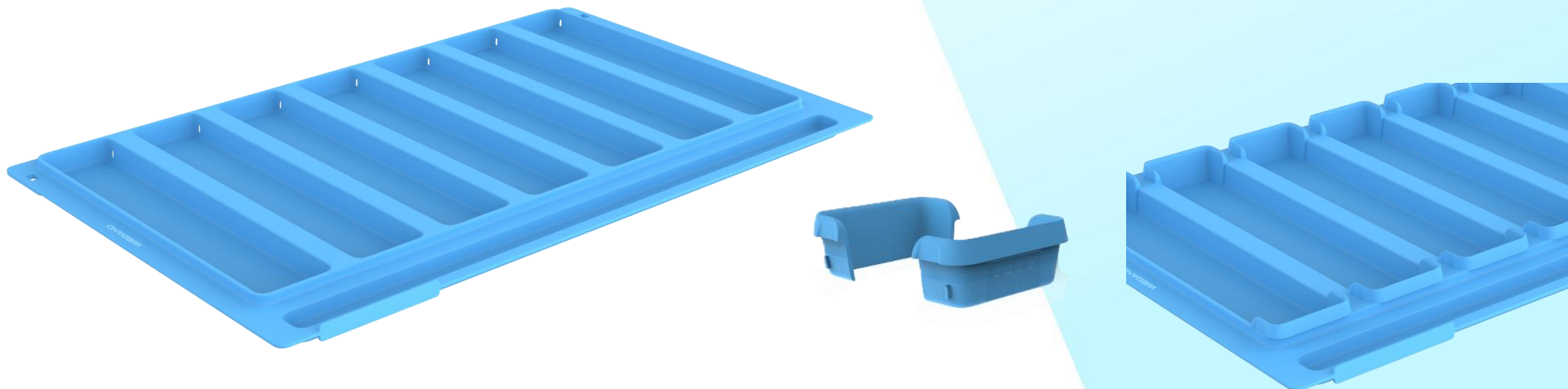

Plateaux de stockage – Aperçu

Pour le stockage des MediDispenser 16X, le plateau suivant est disponible:

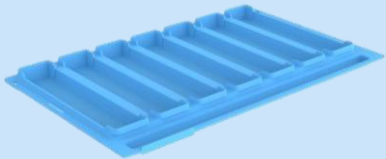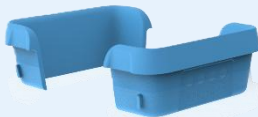Image	Désignation	N° d'article
	Plateau de stockage pour MediDispenser 163, 165 — largeur 600 mm	150.161.602
	Adapter-Clip	151.141.200

Timeline

Prochaines étapes	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Okt.	Nov.
Mise en service du robot d'emballage											
Commercialisation											
Lancement famille 14X											
Lancement famille 12X											
Lancement famille 18X											
Lancement famille 16X											

IFAS Expo 2026 – La gamme complète sera présentée pour la première fois.

Questions

