




Abbott

# POUR UN DIAGNOSTIC ET UN TRAITEMENT DIFFÉRENTIELS RAPIDES

DE LA COVID-19 ET DE LA GRIPPE A ET B AVEC UN SEUL ÉCOUVILLON


## PANBIO™ COVID-19/FLU A&B RAPID PANEL (NASOPHARYNGEAL)

- Pour les patients présentant des symptômes ou une suspicion d'infection active par la COVID-19 ou la grippe A et/ou B
- 1 seul écouvillon nasopharyngé pour la COVID-19 et la grippe A et B
- Flux de travail simplifié avec un tube de tampon pré-rempli
- Aucun instrument nécessaire pour interpréter les résultats
- Résultats en 15 minutes

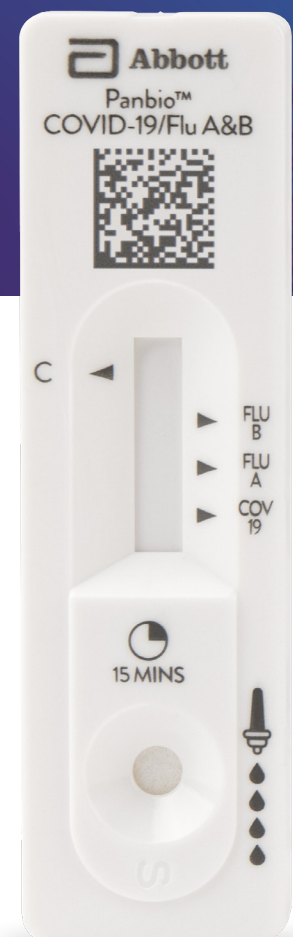


Panbio™ est utilisé dans plus de 100 pays


## CONÇU POUR FACILITER LES TESTS

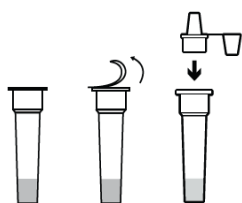

● TUBE DE TAMPON PRÉ-REMPLI AVEC BOUCHON COMPTE-GOUTTES INTÉGRÉ. PAS DE REMPLISSAGE MANUEL NÉCESSAIRE

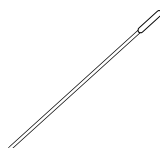


● UN SEUL ÉCOUVILLON DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON NÉCESSAIRE

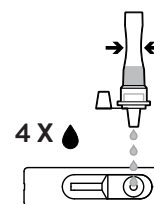

● FORMAT SIMPLE DE LA CASSETTE-TEST AVEC UN SEUL Puits D'ÉCHANTILLON

## PROCÉDURE DE TEST

Consulter le mode d'emploi pour connaître la procédure complète.

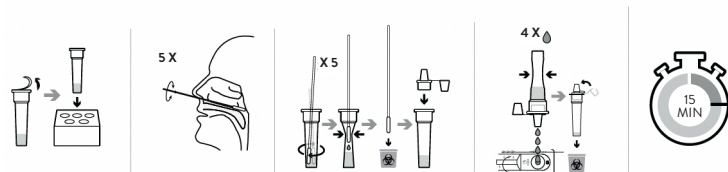

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **DURÉE DU TEST** : 15 MINUTES
- **CONSERVATION** : entre 2 °C et 30 °C
- **MARQUAGE CE**
- **TYPE D'ÉCHANTILLON** : Écouvillon nasopharyngé (NP)

## PERFORMANCES

	COVID-19	COVID-19 (Ct ≤ 30)	GRIPPE A	GRIPPE B
<b>SENSIBILITÉ</b>	88,0 %	94,4 %	92,0 %	100 %
<b>SPÉCIFICITÉ</b>	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>IC à 95 % (Sens.)</b>	80 % - 93,6 %	87,5 % - 98,2 %	80,8 % - 97,8 %	92,9 % - 100 %
<b>IC à 95 % (Spéc.)</b>	98,2 % - 100 %	98,2 % - 100 %	98,2 % - 100 %	98,2 % - 100 %

**UTILISATION PRÉVUE** : Le Panbio™ COVID-19/Flu A&B Rapid Panel (NP) est un test rapide de diagnostic *in vitro* pour la détection qualitative de l'antigène (Ag) du SARS-CoV-2 et de la grippe A et B dans des échantillons humains sur écouvillon nasopharyngé provenant de personnes répondant aux critères cliniques et/ou épidémiologiques de la COVID-19 et de la grippe. Panbio™ COVID-19/Flu A&B Rapid Panel (NP) est destiné à un usage professionnel et est conçu pour être utilisé comme une aide au diagnostic de l'infection par le SARS-CoV-2 et la grippe. Ce produit peut être utilisé dans un environnement de laboratoire et hors laboratoire.

Ce test fournit des résultats de test préliminaires. Les résultats négatifs n'excluent pas une infection par le SARS-CoV-2 et la grippe A et B, et ils ne peuvent pas, à eux seuls, justifier le traitement ou d'autres décisions de prise en charge. Les résultats négatifs doivent être associés aux observations cliniques, aux antécédents du patient et aux informations épidémiologiques.

## INFORMATIONS DE COMMANDE

- **Panbio™ COVID-19/Flu A&B Rapid Panel (Nasopharyngeal)**
- **RÉFÉRENCE CATALOGUE** : 62FK10 ; 10 tests/kit (kit de contrôle vendu séparément ; référence catalogue : 62FK11C)
- **CONTIENT** : 10 dispositifs de test, 10 tubes de tampon d'extraction, 10 capuchons de buse, 10 écouvillons nasopharyngés stérilisés pour le prélèvement d'échantillons, 1 porte-tubes, 1 mode d'emploi avec guide de référence rapide.

**CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL DÈS AUJOURD'HUI  
OU RENDEZ-VOUS SUR [GLOBALPOINTOF CARE.ABBOTT](https://globalpointofcare.abbott)**