




Abbott

TIJDIG DIFFERENTIËLE DIAGNOSE EN BEHANDELING

VAN COVID-19 EN FLU A&B MET ÉÉN SWAB


PANBIO™ COVID-19/FLU A&B RAPID PANEL (NASOPHARYNGEAL)

- Voor patiënten met symptomen of vermoeden van een huidige COVID-19-, influenza A- en/of influenza B-infectie
- Slechts 1 nasofaryngeale swab nodig voor zowel COVID-19 als influenza A en B
- Vereenvoudigde workflow met voorgevuld bufferbuisje
- Geen instrumenten nodig om resultaten te interpreteren
- Resultaten binnen 15 minuten

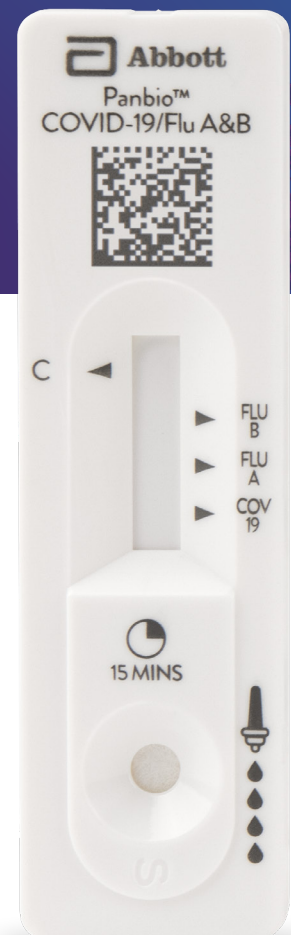

Panbio™ is het vertrouwde merk dat in meer dan 100 landen wordt gebruikt.


ONTWORPEN VOOR GEMAKKELIJK TESTEN

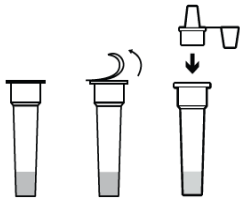

• VOORGEVULD BUFFERBUIJSJE MET GEÏNTEGREERDE DRUPPELDOP. HANDMATIG VULLEN NIET NODIG




• SLECHTS ÉÉN SWAB NODIG VOOR MONSTERAFNAME

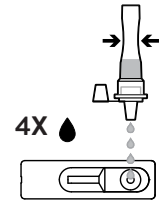

• TESTCASSETTE MET EENVOUDIG ONTWERP EN ÉÉN MONSTER-WELL

TESTPROCEDURE

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de volledige procedure.

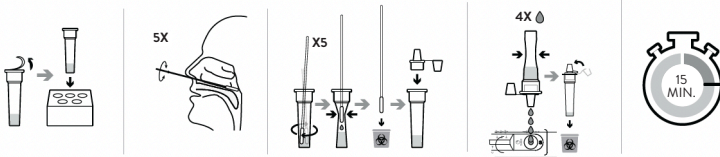

SPECIFICATIES

- **TESTDUUR:** 15 MINUTEN
- **OPSLAGTEMPERATUUR:** 2 °C–30 °C
- **CE-MARKERING**
- **MONSTERTYPE:** Nasofaryngeale (NF) swab

PRESTATIES

	COVID-19	COVID-19 (Ct≤30)	INFLUENZA A	INFLUENZA B
SENSITIVITEIT	88,0%	94,4%	92,0%	100%
SPECIFICITEIT	100%	100%	100%	100%
95% BI (sens.)	80% - 93,6%	87,5% - 98,2%	80,8% - 97,8%	92,9% - 100%
95% BI (spec.)	98,2% - 100%	98,2% - 100%	98,2% - 100%	98,2% - 100%

BEOOGD GEBRUIK: Het Panbio™ COVID-19/Flu A&B Rapid Panel (NP) is een *in vitro*-diagnostische sneltest voor de kwalitatieve detectie van SARS-CoV-2 en influenza A&B-antigeen (Ag) in menselijke nasofaryngeale swabs van personen die voldoen aan de klinische en/of epidemiologische criteria voor COVID-19 en influenza. Het Panbio™ COVID-19/Flu A&B Rapid Panel (NP) is voor professioneel gebruik en is bedoeld om te worden gebruikt als hulpmiddel bij het diagnosticeren van SARS-CoV-2- en influenza-infectie. Het product kan worden gebruikt in een laboratorium- en een niet-laboratoriumomgeving.

De test levert voorlopige testresultaten. Negatieve resultaten sluiten een infectie met SARS-CoV-2 en influenza A&B niet uit en kunnen niet worden gebruikt als de enige basis voor behandeling of andere besluitvorming. Negatieve resultaten moeten worden gecombineerd met klinische observaties, de voorgeschiedenis van de patiënt en epidemiologische informatie.

BESTELINFORMATIE

- **Panbio™ COVID-19/Flu A&B Rapid Panel (Nasopharyngeal)**
- **CATALOGUSNUMMER:** 62FK10; 10 tests/kit (controlekit wordt apart verkocht; catalogusnummer: 62FK11C)
- **INHOUD:** 10 testhulpmiddelen, 10 extractiebufferbuisjes, 10 druppeldopjes met kapje, 10 gesteriliseerde swabs voor nasofarygeale monsterafname, 1 buizenhouder, 1 gebruiksaanwijzing met beknopte naslaggijs

NEEM VANDAAG NOG CONTACT OP MET UW PLAATSELIJKE VERTEGENWOORDIGER OF GA NAAR [GLOBALPOINTOFCARE.ABBOTT](https://www.globalpointofcare.abbott)

