

Mefix®

NONWOVEN FIXATIEPLEISTER


Mefix is de ideale fixatie van verbanden, kompressen, katheters en tubes. Het biedt een veilige fixatie en de adhesielaag is zacht voor de huid.




Gebruiksaanwijzing – fixatie door middel van S-insnijding



Knip de gewenste lengte af.

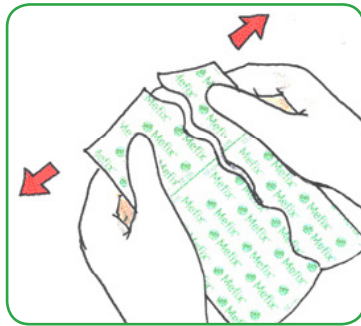

Breek het bescherm papier in twee door Mefix zachtjes uit te rekken en te buigen. Verwijder het smalste gedeelte van het papier.

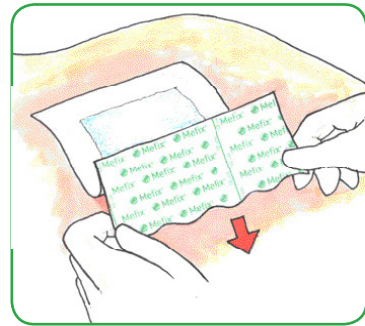

Breng het klevende gedeelte aan op de huid. Verwijder vervolgens het andere gedeelte van het bescherm papier. Strijk Mefix glad zodat de pleister goed kleeft. Vermijd het om Mefix uit te rekken bij het aanbrengen

Hoe werkt Mefix?

De poreuze structuur van het nonwoven materiaal waarborgt de doorlaatbaarheid van lucht en waterdamp. De pleister is flexibel en vormt zich perfect naar de lichaamscontouren zodat men zich vrij kan bewegen. Het materiaal is eveneens niet-absorberend en vormt een barrière tegen doorsijpeld bloed en wondvocht. De polyacrylaat kleeflaag op waterbasis biedt een veilige fixatie en is tevens niet-agressief voor de huid. Het bescherm papier is voorzien van maataanduidingen met telkens een interval van 10 cm zodat de pleister gemakkelijk in de gewenste afmeting geknipt kan worden; Dankzij de insnijding is het bescherm papier eenvoudig te verwijderen en aan te brengen.

Voordelen van Mefix

- Huidvriendelijke adhesielaag op waterbasis en zonder oplosmiddelen
- Bescherm papier met maataanduiding om efficiënt te kunnen afmeten en afknippen
- Vormt zich goed naar lichaamscontouren
- Luchtdoorlatend, voorkomt maceratie en zorgt voor meer comfort
- Kan gesteriliseerd worden door middel van stoom en EtO



Toepassingen

Mefix kan gebruikt worden in de meest uiteenlopende situaties waar fixatie vereist is, zoals fixatie van verbanden, kompressen, katheters en tubes.

Voorzorgsmaatregelen

Breng Mefix aan in de anatomische houding en zonder tractie om beschadigingen van de huid te voorkomen. Zeker wanneer Mefix wordt aangebracht op gewrichten is dit een belangrijk aandachtspunt.

Mefix is niet steriel verkrijgbaar in 10 en 2.5 meter rollen in dispenser dozen.

Mölnlycke Health Care NV

Berchemstationstraat 72 b 2 - 2600 Berchem (Antwerpen)
Telefoon +32(0)3 286 89 50 - Fax +32(0)3 286 89 52
www.molnlycke.com/be-nl

De naam en het logo van Mölnlycke Health Care en Mefix® zijn geregistreerde handelsmerken van Mölnlycke Health Care AB.


Mölnlycke®