



QUALIBelly advanced™

Ceinture abdominale pour enfants
et nourrissons



peluche offerte avec chaque ceinture

	Mesure 1: partie la plus large de l'abdomen, des hanches ou de la taille.	Mesure 2 : moins de 20 cm	Mesure 2 : plus de 20 cm
	Mesure 2: distance entre le sternum et l'os pubien.	Deux bandes Hauteur totale : 10 cm	Trois bandes Hauteur totale : 15 cm
Mesure 1	Taille	Code de commande:	
35 - 50 cm	Toddler	QLY2TOD	QLYTOD
50 - 65 cm	Pediatric	QLY2PED	QLYPED
Tailles sur mesure disponibles sur demande			

Accessoires	
Description	Code de commande:
Coussin de ceinture de sécurité pédiatrique QualiPad	QTSEPAP

Kit de soins postopératoires	
Kit de soins postopératoires (QualiBelly Advanced Ped. + QualiPad Ped. + kit peluche fourni dans un filet de lavage)	QTKIT + QLY taille

Usage pour un seul patient. Sans latex naturel (NRL).
Fourni à l'unité avec mode d'emploi.
Nettoyage (même patient uniquement): lavage à 30°C avec savon neutre.
Séchage à plat. Ne pas sécher en machine.



Breveté:
U.S. Pat. No. 9,579,237 B2



QUALITEAM

Via Torino 12
10010 Burolo (TO)
ITALY

Tel: +39 0125 54691
info@qualiteam.com
www.qualiteam.com



QLY.PEB.FR.26.03-02

QUALIBelly advanced™

Ceinture abdominale pour enfants
et nourrissons

Conçu par une
infirmière



Les enfants ont aussi besoin
de sécurité, de confort et de
moins de douleur après une
intervention chirurgicale.

peluche offerte avec chaque ceinture



Une compression confortable et contrôlée favorise l'activité.

- L'activité peut aider à stimuler la fonction gastro-intestinale pendant la récupération.
- Être actif peut sembler plus facile lorsque les muscles douloureux sont doucement stabilisés.
- La compression peut aider à réduire la douleur liée aux ecchymoses et aux gonflements.
- La stabilisation de la paroi abdominale pendant la récupération peut aider à réduire les facteurs associés à la hernie et à la déhiscence.

QUALIBelly
advanced™

Ceinture abdominale pour enfants et nourrissons



Aide à protéger les jeunes patients après une chirurgie abdominale.

Confort élevé grâce à une compression individuelle adaptée à l'abdomen, aux besoins de l'enfant et à la zone d'incision.


Soins de la plaie facilités avec moins d'inconfort.

Caractéristiques de QualiBelly Advanced Pediatric:

Matériau ultra-léger, sans latex, respirant

Réduit l'inconfort, les ecchymoses et les gonflements

Exerce une pression douce sur les muscles abdominaux douloureux

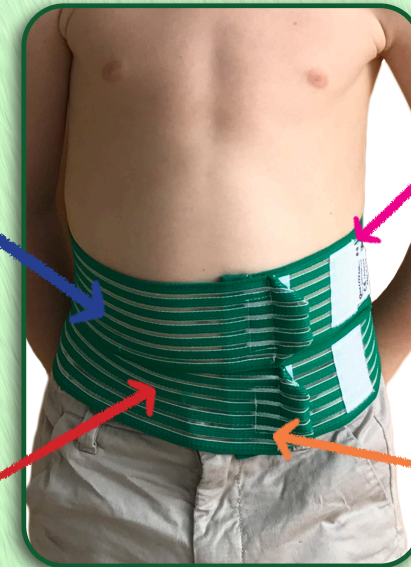


Aide à maintenir des conditions locales favorables dans la zone chirurgicale

Permet un accès facile pour les soins de la plaie

Compression réglable individuellement sur chaque bande

Fermeture frontale réglable

Favorise une respiration et des mouvements confortables

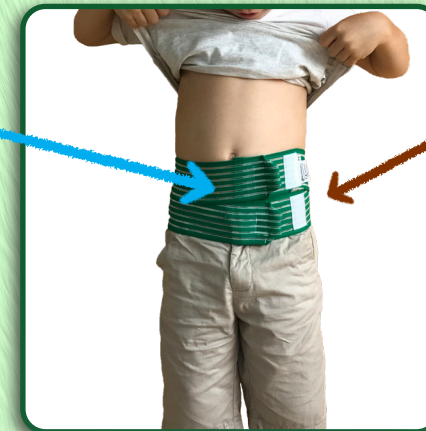

Soutien du dos et meilleure posture

Disponible en ceinture à 2 ou 3 bandes

Sûr - Maintenu - Protégé

QUALIBelly
advanced™

Ceinture abdominale pour enfants et nourrissons