

Huwa-San® FOGGER



Checklist ruimtedesinfectie met Huwa-San® Fogger

Deze checklist voor ruimtedesinfectie moet worden opgevolgd. Deze moet ondertekend worden door de operator van de Huwa-San® Fogger en zijn/haar leidinggevende, en moet worden bewaard in een logboek.

Omschrijving taak	Aankruisen:	Operator	Leiding- gevende
Vorbereitung kamer			
Zorg ervoor dat het ventilatiesysteem is uitgeschakeld en dat alle ventilatieopeningen goed zijn afgedekt.			
Plaats de afdekkap over de rookmelder en koppel indien nodig de rookmelder los.			
Gooi alle vuilnis weg en verwijder eetbare producten.			
Zorg ervoor dat alle oppervlakken zichtbaar schoon zijn.			
Verwijder of sluit containers met vloeistoffen of chemicaliën (wasmiddelen, bleekmiddel, enz.).			
Vraag toestemming aan de leidinggevende om de ontsmetting met Huwa-San van start te laten gaan.			
Plaats de melding "VERBODEN TOEGANG" aan alle toegangspunten, met aanduiding van de start- en eindtijden van de cyclus.			
Zorg ervoor dat er geen mensen in de kamer zijn. Alle hoeken van de ruimte moeten zichtbaar zijn. Indien dit niet geval is, moeten de onzichtbare gebieden (zoals toilet, badkamer, etc.) persoonlijk gecheckt worden.			
Sluit alle ramen. Zorg ervoor dat openingen of spleten naar andere kamers worden afgedicht met tape.			
Desinfectieprotocol			
Plaats Huwa-San Fogger op de juiste manier in de kamer.			
Volg de handleiding van Roam Technology.			
Start de ontsmettingscyclus en verlaat de ruimte binnen de tijd die op het display wordt aangegeven.			
Plak tape om deuren af te sluiten.			
Start desinfectie afgerond	Naam	Datum	Handtekening
Operator			
Leidinggevende			
Na desinfectie			
Respecteer de contacttijd als de desinfectie is voltooid.			
Verzekert je ervan dat de concentratie H_2O_2 <2 ppm is alvorens de kamer binnen te gaan, of ga met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen naar binnen. Geef de ruimte pas terug vrij als de concentratie H_2O_2 <1 ppm			
Verwijder bedekkingen van ventilatieopeningen en herstart ventilatiesystemen.			
Verwijder de afdekkap van de rookmelder en sluit de rookmelder weer aan.			
Verwijder de "VERBODEN TOEGANG" aanduidingen en tape die gebruikt werd om openingen en spleten af te dichten.			
Huwa-San Fogger en Huwa-San TR-12.5 veilig verwijderen en bewaren.			
Vervolledig alle gegevens in het logboek.			
Desinfectieproces afgerond	Naam	Datum	Handtekening
Operator			
Leidinggevende			