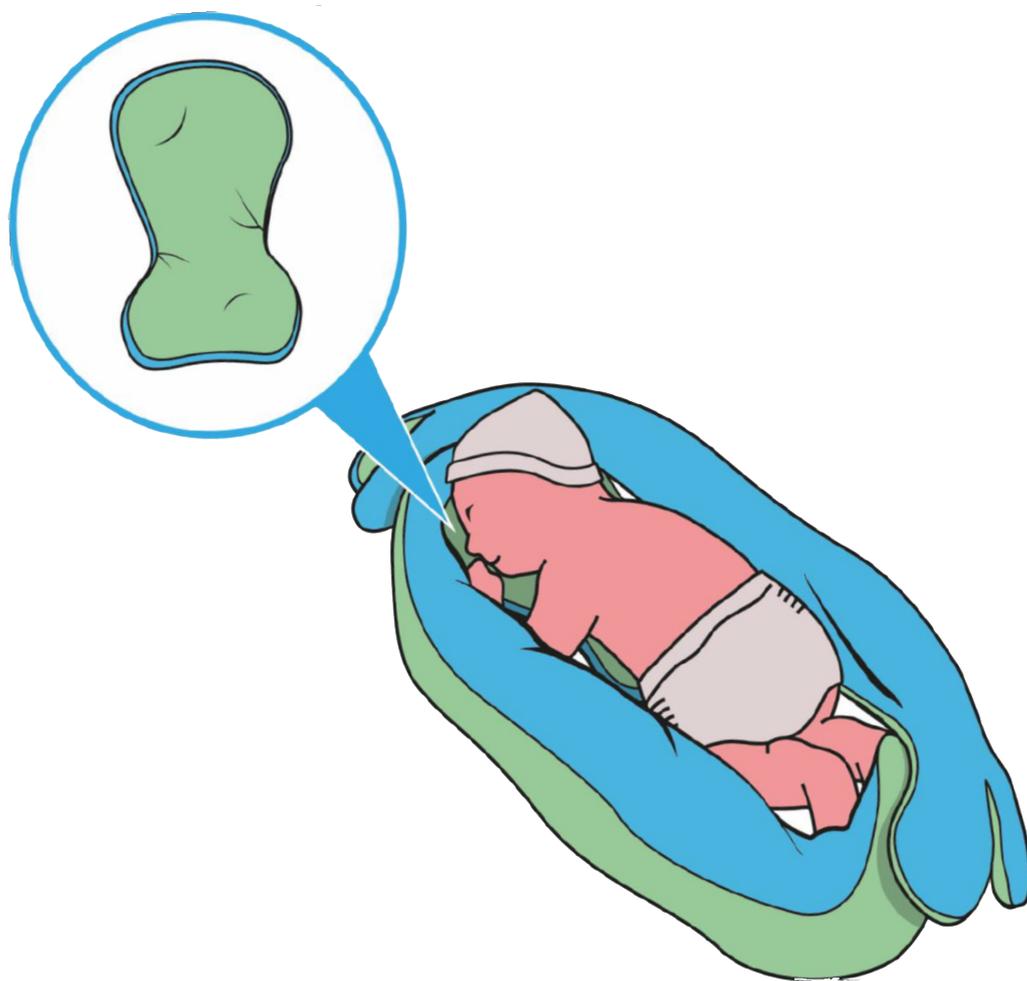

FICHE D'INSTRUCTIONS

Benjamin ComfyBelly





- Utilisez toujours le Belly sous le contrôle du moniteur.
- Utilisez le Belly pour des bébés d'un poids recommandé compris entre 2 500 et 5 000 grammes.
- Ne le placez pas sur la poitrine, le ventre ou le visage, car cela pourrait entraver la respiration.

ComfyBelly

Le ComfyBelly a été développé pour soutenir la position ventrale des bébés malades et prématurés à l'hôpital. Le Belly contribue à un arrondi naturel des épaules et favorise la coordination main-bouche et la position médiane. Il s'agit de points essentiels pour favoriser le développement des bébés. Le Belly permet d'incliner les jambes de l'enfant vers l'avant avec le bassin et de favoriser la flexion des membres sans exercer une pression excessive sur les genoux et les coudes.

Utilisation

- positionnez le Comfy Belly sous la tête et le tronc
- pas plus bas que la hauteur du nombril et pas plus large que le tronc
- les épaules légèrement fléchies et soutenues
- les jambes relevées
- le bébé est soutenu par les bords du ComfyNest ou du Boundy

Spécifications

- disponible en 2 tailles : S> 500 g-1 500 g - L> 1 500 g-3 500 g
- la housse est en textile technique
- la partie intérieure est amovible selon le protocole hospitalier
- lavable à 60-95° et adapté au sèche-linge
- utilisable en combinaison avec ComfyNest ou Boundy

