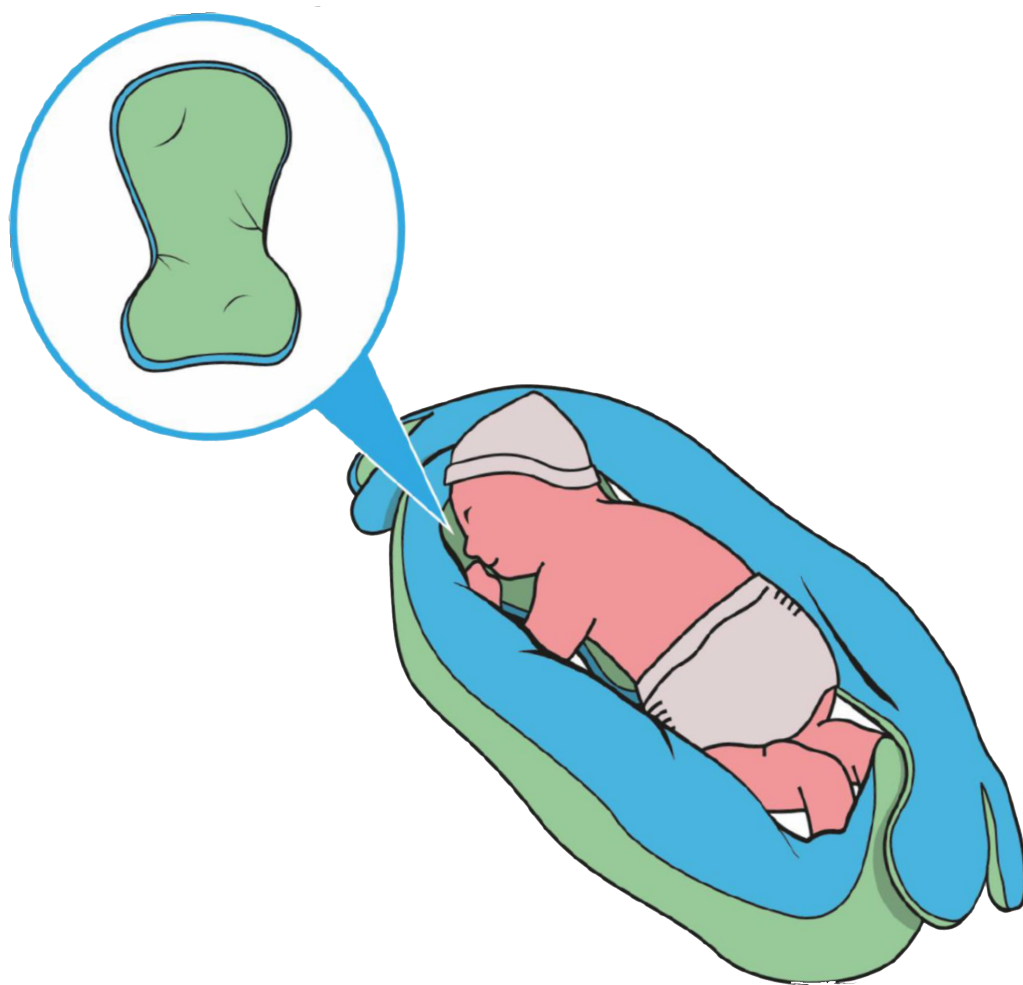

INSTRUCTIEKAART

Benjamin ComfyBelly





- Gebruik altijd onder monitorbewaking
- Gebruik de Belly voor baby's in de aanbevolen gewichtsklasse 500-3500 gram
- Leg niet op uw borst, buik of gezicht, omdat dit de ademhaling kan belemmeren

ComfyBelly

De Comfy Belly is ontwikkeld om de buikligging van zieke en pre-term geboren baby's te ondersteunen in het ziekenhuis. De Belly draagt bij aan een natuurlijke afronding van de schouders en bevordert de mogelijkheid tot hand-mond coördinatie en middellijn-oriëntatie. Dit zijn belangrijke componenten ter ondersteuning van de ontwikkeling van baby's. Bij gebruik van de Belly worden de benen van het kind met het bekken naar voren gekanteld en bevordert het de flexie van de ledematen zonder overmatige druk op knieën en ellebogen.

Gebruik

- positioneer de Comfy Belly onder hoofd en romp
- niet lager dan de navelhoogte en niet breder dan de romp
- de schouders licht gebogen en ondersteund
- de benen opgetrokken
- de baby gesteund wordt door de randen van het ComfyNest of Boundy

Specificaties

- verkrijgbaar in 2 maten: S > 500 g-1500 g - L > 1500 g-3500 g
- de stoffen hoes is gemaakt van technisch textiel
- het binnen gedeelte is afneembaar volgens ziekenhuisprotocol
- wasbaar 60-95 ° en geschikt voor drogen in de droogtrommel
- bruikbaar in combinatie met het met ComfyNest of Boundy

