

derma+flex - FAQ



Mag mijn wonde nat worden?

- Douchen kan, zwemmen is niet toegestaan.
- U dient uw wonde min. 1 uur droog te houden, nadien kan u zich wassen.
- Bij een hoofdwonde kan u uw haar wassen, maar dep nadien onmiddellijk droog.

Zijn er voorzorgsmaatregelen?

- Plak geen pleister over de huidlijm.
- Breng geen crèmes of lotions aan.
- Dep zachtjes op uw wonde om het te drogen - niet wrijven.
- Verwijder de huidlijm niet - bij het helen van de wonde zal deze loskomen na een periode van 5-10 dagen.
- Krab niet, het korstje zal er afkomen zodra uw wonde genezen is.

Wanneer moet ik contact opnemen met mijn arts?

- Bij koorts.
- Pijnklachten.
- Wanneer er pus uit uw wonde komt.
- Als uw wonde openbarst of begint te bloeden.
- Als uw wonde rood of gezwollen is / tekenen van infectie vertoont.

Wanneer zal de lijm verwijderd worden?

- Derma+Flex zal natuurlijk afpellen door huidregeneratie, meestal binnen de 5-10 dagen.

Is een verband nodig op mijn wonde?

- Neen, de lijm zorgt voor een antimicrobiële barrière, zodat er geen infecties in de wonde kunnen ontstaan.

Voor meer informatie: marketingbenelux@vygon.com