



Goed beschermd tegen prikaccidenten

met Betica-veiligheidspennaalden
en -veiligheidslancetten

Bescherm jezelf. Gebruik Betica.

Jij bent één van de vierhonderdduizend verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland die het hart van de gezondheidszorg vormen. Elke dag zetten jij en je collega's je in om goede zorg te leveren.

Je wordt daarbij regelmatig blootgesteld aan allerlei besmettingsrisico's zoals door prikaccidenten. Denk aan het risico op besmetting met meer dan dertig potentieel gevaarlijke micro-organismen waaronder: hepatitis B, hepatitis C en HIV. Belangrijk om jezelf dus goed te beschermen.

Prikaccidenten voorkomen

Om prikaccidenten te voorkomen, zijn werkgevers in de gezondheidszorg sinds 2012 onder andere verplicht om:

- een medisch hulpmiddel met een ingebouwd veiligheids- en beschermingsmechanisme ter beschikking te stellen als er gevaar is voor letsel of infectie door een scherp medisch hulpmiddel;
- het terugzetten van doppen op injectie-naalden (recappen) te verbieden.

Veilig werken met Betica

Betica-veiligheidspennaalden en -veiligheidslancetten zijn speciaal ontwikkeld om prikaccidenten te voorkomen. Daarnaast dragen ze bij aan meer injectiecomfort voor jouw cliënten. Zo kun jij met een gerust hart veilig jouw werk doen.

Veiligheidspennaalden

Veiligheidspennaalden van Betica dragen bij aan meer injectiecomfort voor uw cliënt en meer veiligheid voor jou.



De Betica Dual Safety Veiligheidspennaalden zijn zowel te gebruiken met de loodrecht-techniek als met de schuine injectietechniek, dit is uniek.

Eenvoudig te testen door de transparante beschermkap.



Het veiligheidsmechanisme is speciaal ontworpen voor minimaal benodigde druk en een zo soepel mogelijk verloop van de injectie.




Elektrolytisch gepolijst voor een extra gladde canule.


Betica-veiligheidspennaalden hebben een dubbele ingebouwde beveiliging. Na de injectie bedekt deze de naald aan de cliëntzijde én de penzijde automatisch met een beschermende cover.

**dubbele
beveiliging**

Gebruiksaanwijzing veiligheidspennaalden

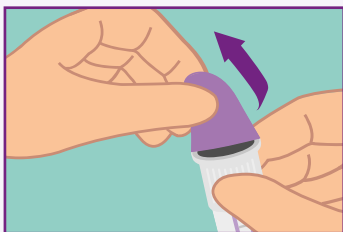


1. Controleer de juiste maatvoering veiligheidspennaald op het papieren bescherm laagje. Verwijder het papieren bescherm laagje van de veiligheidspennaald.

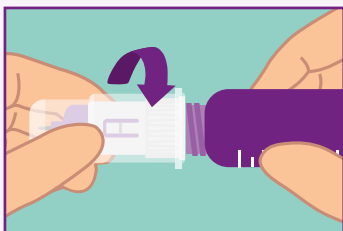


2. Bevestig de veiligheidspennaald. Draai de Betica veiligheidspennaald in een hoek van 180° recht op de insulinepen totdat je weerstand voelt.




3. Ontlucht de veiligheidspennaald door twee eenheden insuline door te spuiten, totdat er zich een druppel op de naald vormt. Laat de transparante kap zitten en verwijder deze pas als je gaat injecteren.

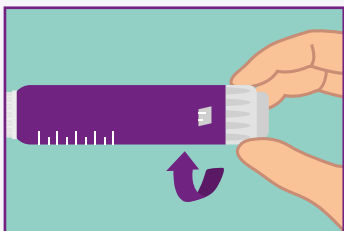


4. Stel het aantal eenheden insuline in volgens voorschrift van de behandelaar.

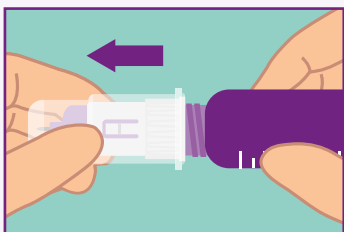


5. Verwijder de transparante buitenste beschermkap met een rechte beweging. Door de zichtbare naald bepaal je eenvoudig de juiste injectieplaats.

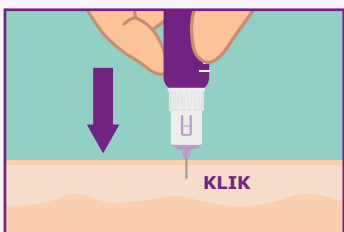


6. Breng de naald met een vloeiende beweging in de huid zodat de gekleurde naald-beschermer zich terugtrekt. Als je een klink hoort, is het veiligheids-mechanisme geactiveerd.

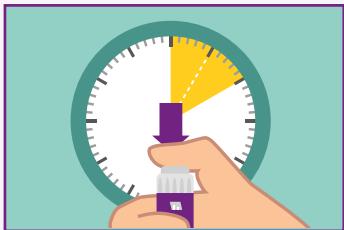

- 7.** Oefen constante druk uit en injecteer de insuline volgens de instructie van de behandelend specialist of diabetesverpleegkundige. Verwijder de naald niet voordat je de volledige dosis hebt geïnjecteerd.

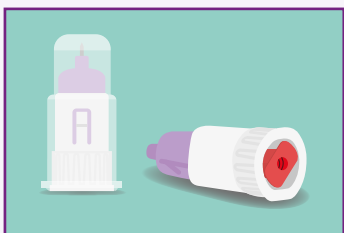

- 8.** Na de injectie wordt de naald aan de cliëntzijde en de penzijde automatisch voorzien van een beschermende cover.

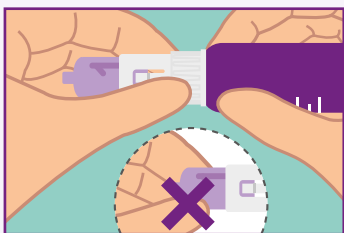

- 9.** Verwijder de Betica-veiligheidspennaald door deze vast te pakken bij de witte naaldhub. Draai vervolgens de veiligheidspennaald van de insulinepen door tegen de klok in te draaien.



- 10.** Voer de gebruikte Betica-veiligheidspennaald volgens voorschrift af. Wij adviseren u deze in een naaldencontainer te werpen.

