

Quality time for better care

"Quality time for better care" is the brand promise of Terumo Medical Care Solutions.



HOSPITAL CARE

AGANI™

Hypodermische veiligheidsnaald



Vermijd een prikongeval  
met een simpele klik


# Het risico beperken met Agani™ hypodermische veiligheidsnaalden

Hoe meer injecties, hoe hoger het risico op prikongevallen, wat de behoefte aan veiligheidsnaalden vergroot




Agani™ hypodermische veiligheidsnaalden bieden een oplossing om prikongevallen te voorkomen. Na het terugtrekken van de naald, kan de aanwezige beschermhuls over de naald worden geklikt om het risico op een onbedoelde naaldprik te minimaliseren.

## Activering van het veiligheidsmechanisme

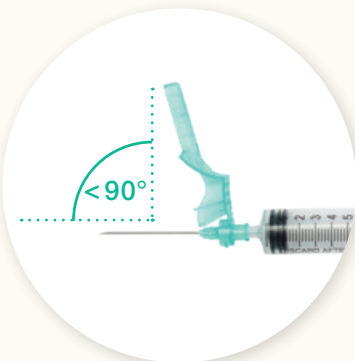

Gebruik de eenhandige techniek en duw het klepje naar voren met uw vinger of duim zodat de huls en de naald een hoek van minder dan  $90^\circ$  vormen. Houd uw vinger of duim altijd achter het klepje.

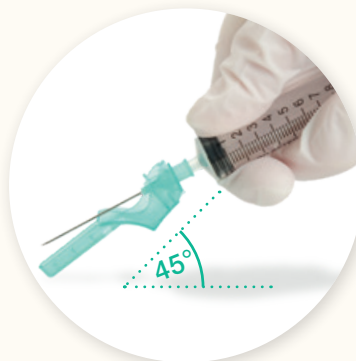

Plaats de huls in een hoek van ongeveer  $45^\circ$  op een vlakke ondergrond.



Druk met een stevige, snelle beweging naar beneden tot u een duidelijke klik hoort.

# Toegewijd om de dingen beter te maken

Bescherming van zorgverleners tegen prikongevallen is een belangrijk hulpmiddel in een zorgomgeving.

Ons doel is eenvoudige, effectieve oplossingen te creëren om iedereen te ondersteunen die het beste van zichzelf geeft om patiënten te behandelen.



Contributing to Society  
through Healthcare



**TERUMO EUROPE N.V.**

Terumo Corporation    Terumo Europe N.V.  
+81 3 6742 8500    +32 16 38 12 11

[www.terumo-europe.com](http://www.terumo-europe.com)

Uw Terumo-partner

Alle merknamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van TERUMO CORPORATION, haar dochterondernemingen of niet-verwante derde partijen.  
Gepubliceerd door Terumo Europe nv

Houd er rekening mee dat sommige producten mogelijk niet in alle regio's beschikbaar zijn; neem contact op met uw lokale Terumo-contactpersoon.

# Kies voor veiligheid in het hele gamma



## Agani™ hypodermische veiligheidsnaalden

van 18G tot 30G

Latexvrije, EO-gesteriliseerde hypodermische naalden voor eenmalig gebruik, gemaakt van kunststof en roestvrij staal.

Alle naalden zitten in een steriele, individuele blisterverpakking met kleurcodering.



### Het gamma omvat een breed scala aan naaldlengtes en -diameters



#### 18G canule (ø 1,2 mm)

Lengte: 25, 38 mm

Kleur: roze



#### 19G canule (ø 1,1 mm)

Lengte: 25, 38 mm

Kleur: crème



#### 20G canule (ø 0,9 mm)

Lengte: 25, 38 mm

Kleur: geel



#### 21G canule (ø 0,8 mm)

Lengte: 25, 38 mm

Kleur: groen



#### 22G canule (ø 0,7 mm)

Lengte: 25, 38 mm

Kleur: zwart



#### 23G canule (ø 0,6 mm)

Lengte: 25, 38 mm

Kleur: blauw



#### 25G canule (ø 0,5 mm)

Lengte: 16, 25, 38 mm

Kleur: oranje



#### 26G canule (ø 0,45 mm)

Lengte: 13 mm

Kleur: bruin



#### 27G canule (ø 0,4 mm)

Lengte: 13 mm

Kleur: grijs



#### 30G canule (ø 0,3 mm)

Lengte: 13 mm

Kleur: geel

Raadpleeg voor meer bestelinformatie de productinformatiekaart van de Agani™ hypodermische veiligheidsnaalden.



Bevat geen componenten die vervaardigd zijn uit pvc of natuurlijk rubberlatex.



# Veilig en eenvoudig gebruik beschermt zorgverleners die risico lopen

Het gebruik van veiligheidshulpmiddelen is nuttig gebleken bij de preventie van prikongevallen in de ziekenhuis- en gezondheidszorgsector.<sup>1,2</sup>



**Veelzijdigheid**  
Kan worden gebruikt met standaard Luer-Slip- of Luer-Lockspuiten.

**Betrouwbare veiligheidsactivering**  
Hoorbare klik en een doorzichtig hulsvenster bevestigen dat de naald veilig vastzit in de beschermhuls.

**'KLIK'**

**Activering met één hand**  
Het veiligheidsmechanisme maakt het mogelijk om de huls met één hand te activeren.

**ISO 6009-kleurgecodeerde hub**  
Eenvoudige herkenning van de gewenste grootte door de ISO-kleurcodes.



## Soepele en makkelijke injectie verhoogt het gebruikscomfort

Agani™ hypodermische veiligheidsnaalden hebben een scherpe lancetpunt en een laagje siliconen glijmiddel aan de buitenkant.

### De scherpe punt

- Maakt de penetratie van de huid gemakkelijker
- Helpt het trauma te minimaliseren

### De siliconen coating

- Zorgt voor goede glijdende eigenschappen
- Maakt een vlotte inbrenging mogelijk

Agani™ hypodermische veiligheidsnaalden zijn ontworpen om een hoge mate van veiligheid, zorg en comfort te bieden bij de injectie of de aspiratie van geneesmiddelen of bloed. Dankzij het grote assortiment zijn ze geschikt voor een breed scala aan medische toepassingen.

# Prikongevallen bij zorgverleners helpen voorkomen



## Alle prikongevallen houden een zeker risico in

- Ze kunnen gevaarlijke pathogenen overbrengen, zoals het hepatitis B-virus, het hepatitis C-virus of hiv
- Ze veroorzaken onnodige angst en stress bij zorgverleners
- De preventie van letsels door scherpe medische instrumenten bij werknemers wordt gedekt door de Europese Richtlijn 2010/32/EU inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis gezondheidszorgbranche<sup>1</sup>

Vermijd het risico op ernstige infecties!



**Injection & Access**

**Beschermen tegen  
prikongevallen**