



WANADES T

Zeer doeltreffend vloeibaar concentraat voor de desinfectie en reiniging van medicinale baden en andere niet-invasieve medicinale producten

Productbeschrijving:

WANADES T is een desinfectiemiddelconcentraat voor de desinfectie en reiniging van badkuipen op klinisch en therapeutisch gebied en voor andere niet-invasieve medicinale producten.

WANADES T is aldehyde- en fenolvrij. Het product werkt op basis van quaternaire ammoniumverbindingen en beschikt over een uitstekende materiaalcompatibiliteit alsmede uitmuntende corrosievertragers.

Toepassingsgebied vlg. MPG:

Desinfectie en reiniging van badkuipen op klinisch en therapeutisch gebied en voor andere niet-invasieve medicinale producten.

Gebruik:

Handmatige desinfectie:

Desinfectiemiddel in de gewenste concentratie in een geschikte recipiënt bereiden. Op grond van nevelgevaar of aërosalgevaar, eerst vullen met water en daarna concentraat toevoegen. Bad incl. badrand desinfecteren, waarbij u let op volledige bevochtiging van de vlakken. Inwerktijd in acht nemen. Gedesinfecteerde vlakken na afloop van de inwerktijd met helder water naspoeien.

Bij automatische doseertechniek:

bad grondig uitspoelen met desinfectiemiddel uit doseerinstallatie; vlakken incl. badrand schoonvegen met droogdoek gedrenkt in desinfectiemiddel, waarbij u let op volledige bevochtiging van de vlakken. Inwerktijd in acht nemen. Gedesinfecteerde vlakken na afloop van de inwerktijd met helder water naspoeien.

Aanwijzing: bij sterk vervuilde badkuipen een aanvullende reiniger gebruiken op basis van niet-ionische tensio-actieven.

Werkingspectrum:

WANADES T werkt:

- bacteriedodend (incl. MRSA)
- tegen tuberculose
- schimmeldodend (*C. albicans*), levurocide
- inactiverend tegen virussen (HBV/HIV, HCV, noro-virussen, rota-, papova-/polyoma-, adeno-, vaccinia-/influenza-/griep-virussen)

Dosering / Inwerktijd:

bacteriedodend incl. MRSA, schimmeldodend (*C. albicans*)/ levurocide vlg. VAH/DGGM getest

bij verhoogde belasting	1,0 % - 15 min.
	0,5 % - 1 uur
omhulde virussen incl. HBV/HIV/BVDV/HCV/ vaccinia-/influenza-/griep-virussen (beperkt virus- dodend vlg. RKI-aanbeveling)	1,0 % - 15 urr
noro-virussen (FCV)	1,0 % - 2 uur
rota-virussen	0,25 % - 15 min.
papova-/polyoma-virussen	1,0 % - 1 uur
adeno-virussen	2,0 % - 4 uur
vaccinia-virussen (zonder belasting)	0,5 % - 5 min.

Voor alcoholvrije snelle desinfectie

	3,0 % - 1 min.
	2,0 % - 5 min.

Samenstelling:

Als werkzame bestanddelen
zijn per 100 g aanwezig:
16,0 g benzylalkyldimethylammoniumchloride

De in het product aanwezige tensio-actieven zijn biologisch afbreekbaar vlg. EU-detergentiaverordening.

WANADES T

Zeer doeltreffend vloeibaar concentraat voor de desinfectie en reiniging van medicinale baden en andere niet-invasieve medicinale producten

Speciale aanwijzingen:

Schadelijk voor de gezondheid bij inslikken. Veroorzaakt corrosie. Zeer giftig voor waterorganismes. In geval van aanraking met de ogen meteen grondig met water spoelen en een arts raadplegen. Stoom/aërosol niet inademen. Alleen in goed geventileerde ruimtes gebruiken. Dit product en zijn recipiënt moeten als gevaarlijke afval verwijderd worden. Tijdens het werk geschikte beschermende kleding, beschermde handschoenen en beschermende bril/ge-laatsbescherming dragen. Bij een ongeval of of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk etiket laten zien).

WANADES T voldoet aan de EU-richtlijn 93/42/EWG voor medicinale producten.

Doseerhulpen:

1-liter-doseerfles
Doseerpomp can
Vulkraan can
Kansleutel sleukel otener voor can
D-Wipes + D-Wipes dispensersysteem