

De wegwerpbare prikker voor professioneel gebruik biedt comfort en flexibiliteit.

Comfort

- Drie instelbare prikdieptes voor een grotere flexibiliteit en meer comfort voor uw patiënt. Het gewenste bloedvolume wordt gemakkelijk bekomen.
- De huid wordt zeer snel doorpikt (in 3 milliseconden) waardoor ze geen beschadiging oploopt.
- Het drievlaks geslepen naaldpunt zorgt voor een optimale huidpenetratie en garandeert een nagenoeg pijnloze prik.

Hygiëne en veiligheid


- Door het éénmalige gebruik is er minder gevaar voor kruisbesmetting.
- Het lancet wordt automatisch uit de huid teruggetrokken voor een optimale veiligheid.
- Het unieke prikmechanisme kan de kans op onvrijwillig prikken verminderen.

Gebruiksgemak

- Met zijn T-vormig design is hij eenvoudig te hanteren en gemakkelijk aan te leren.



1
Verwijder het steriele beschermkapje met een draaibeweging.

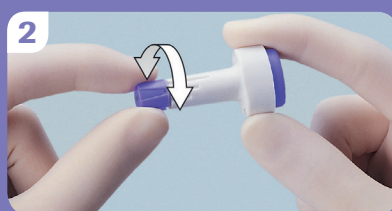


2
Stel de gewenste prikdiepte in door de paarse instelring boven de gekozen diepte (uitsnijding) te draaien.



3
Duw de Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus tegen de zijkant van de vingertop en druk op de bovenste paarse knop om te prikken.


Eenvoudig en veilig te gebruiken.

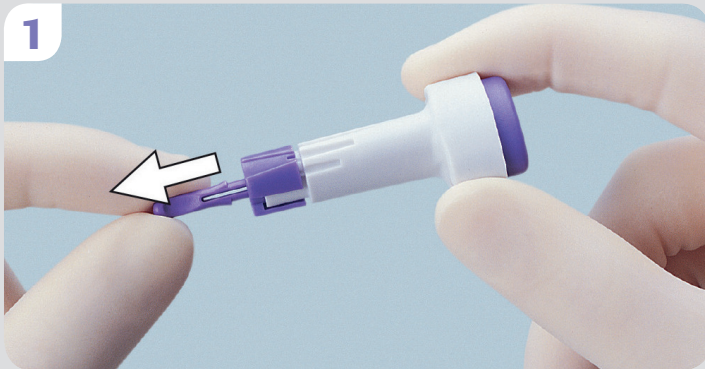

1. Draai en verwijder het steriele beschermkapje.

Gebruik de prikker niet wanneer het steriele beschermkapje reeds verwijderd is aangezien de steriliteit dan aangetast kan zijn.

Een ingebouwd veiligheidsmechanisme verzekert dat de prikker slechts eenmaal kan worden gebruikt. Zo wordt de kans op onvrijwillig prikken verminderd.

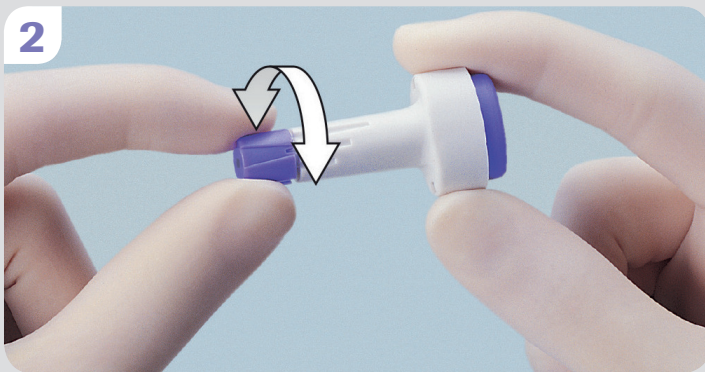

2. Selecteer de prikdiepte

Accu-Chek Safe-T-Pro Plus biedt drie instelbare prikdieptes voor variabel bloedvolume en verschillende huidtypes.

Kies de gewenste diepte door aan de paarse ring te draaien.

De diepte is vooraf ingesteld op gemiddeld. Kies de gewenste prikdiepte na het verwijderen van het steriele beschermkapje.



3. Een bloeddruppel bekomen

Duw de Accu-Chek Safe-T-Pro Plus prikker stevig tegen het te prikken huidoppervlak. Druk op de paarse knop en neem het bloed af.

Ontdek wat mogelijk is.

Voor meer informatie, gelieve de handleiding te raadplegen of bel de Accu-Chek® Service op het gratis nummer

0800 93 626

ACCUCHEK en SAFE-T-PRO zijn handelsmerken van Roche. © 2013 Roche Diagnostics.

www.accu-chek.be
Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeeklei 198
1800 VILVOORDE



ACCUCHEK®