

Care

magazine

01

février
mars '21



au lit et
autour

Positionnement

L'importance d'un coussin de positionnement

Repose

La prévention des escarres

Toilette soignante

Lavage sans eau au lit



ARSEUS MEDICAL
Driving superior care



7

Maintien au lit



10

Prévention des escarres avec Repose



17

Vous êtes dans de bonnes mains

18

Promotions hivernales

#EnsemblecontreCorona

En cette nouvelle année la lutte contre le Corona se poursuit. Avez-vous besoin de matériel de protection? Arseus Medical est heureux de vous aider.

Avant propos

01

Cher professionnel de la santé,

Vous découvrez les premières pages du Care magazine, le tout nouveau bulletin d'information d' Arseus Medical. Désormais il arrivera tous les 3 mois dans votre boîte aux lettres. Nous vous informerons sur divers sujets de santé.

Ce numéro a comme thème "au lit et autour". Nous vous présenterons entre autres la toilette soignante et vous donnerons des conseils sur la manière de positionner au mieux vos résidents pour prévenir les escarres.

Arseus Medical est spécialisé dans la distribution de produits et d'équipements médicaux et paramédicaux répondant à l'ensemble des besoins en soins de santé. Ses activités sont

structurées autour de Pôles d'Excellence qui proposent les meilleures marques au monde.

Les collaborateurs(-trices) d'Arseus Medical s'investissent chaque jour pour concrétiser un engagement fort « Driving superior care ». Une mission inspirante: participer au développement d'un meilleur environnement de soins aux côtés des professionnels de la santé pour un bien-être toujours plus grand des patients et de la population.

Ils oeuvrent en permanence pour construire des situations bénéfiques réciproques basées sur la confiance mutuelle et des collaborations à long terme.

Mieke Phlips
Sales Manager Arseus Medical

Positionnement au lit

Le positionnement au lit est un point d'attention très important pour le confort et le bien-être du résident.

Un bon positionnement entraîne une meilleure détente des muscles et dès lors un meilleur repos nocturne. Cela évite également les douleurs.

Il n'y a pas une seule façon de se positionner correctement. Cela dépend toujours de la situation du résident et de ce que vous souhaitez réaliser.

Dans un premier temps, il s'agit de créer de la **stabilité** afin d'obtenir une réduction de pression (locale) ou d'apporter un soutien à tout le corps. Lorsque le résident est confortablement allongé dans son lit, ses muscles se détendent beaucoup mieux, ce qui lui assure un meilleur repos.

Une bonne stabilité permet également au résident de se sentir plus en sécurité. La stabilité est obtenue en rendant la surface d'appui aussi large que possible. Les coussins de positionnement peuvent parfaitement y contribuer.



Changements de position réguliers

Même si vous avez positionné votre résident de manière très confortable et stable, il est important de le changer régulièrement de position pour éviter les blessures de pression. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire de le tourner de la gauche vers la droite. Des changements majeurs risqueraient de perturber son sommeil. De petits changements de position peuvent suffire à relâcher une certaine pression. Cela peut être fait, par exemple, en travaillant avec notre oreiller de soutien. Vous pouvez le placer sous l'épaule, puis sous le bassin, ...

Pourquoi positionner?

- Fournir de la stabilité
- Fournir une posture confortable
- Réduire la douleur
- Réduire la pression
- Éviter des contractures
- Favoriser la relaxation musculaire
- Soutenir un traitement
- Soulager une blessure

Coussin pour talon :

Art. 1533411

Avec cet oreiller, il est possible de créer des talons flottants, avec un bon support pour le bas des jambes. Parce que l'oreiller est divisé en différents compartiments, il offre également un soutien à l'arrière du genou.



Coussin en forme S :

Art. 1540354

C'est une aide utile et confortable pour changer de posture. Avec ce coussin, vous pouvez installer correctement une personne en position latérale. Le coussin en S peut être utilisé pour soutenir le dos et les jambes, mais il peut également être placé contre le ventre. Vous observez que le résident saisit souvent aussi l'oreiller et se sent donc plus en sécurité.



Coussin Support :

Art. 1540351

Petit coussin à utiliser pour un positionnement ou support supplémentaire, par exemple pour soutenir un bras. Il est très adapté pour de légers changements de position pendant la nuit par exemple.



Pourquoi un coussin de positionnement?

Même si l'on fait attention au bon positionnement, on utilise parfois des outils peu appropriés tels que des oreillers, des coussins décoratifs, des serviettes enroulées, etc. Ce n'est pas recommandé car cela risque justement d'augmenter la pression et les forces de cisaillement. La macération peut également devenir un problème dans la mesure où ces outils ne sont pas respirants. Optez donc pour des coussins de positionnement. Nos coussins sont respirants et peuvent également être facilement nettoyés. Les granulés spécialement remplis d'air assurent une répartition égale de la pression sur le corps.

Aperçu de tous les coussins de positionnement voir page | 10



Plus d'info:

www.ficobelgium.eu

Aperçu Coussins de positionnement



Standard
Art. 1532842



Standard XL
Art. 1532844



Compact
Art. 1549970



Oreiller cervicale
Art. 1532847



Baby
Art. 1541015



Baby XL
Art. 1541222



Abduction
Art. 1549488



Abduction forme coin
Art. 1540353



Pillow
Art. 1540352



Chair
Art. 1550466



AVC
Art. 1549490



U-sit
Art. 1549489



Donut
Art. 1551148



Genou
Art. 1533148

Housses

Pour une hygiène optimale, nous conseillons de mettre une housse autour du coussin.



Blanc
coton



Gitane ligné
coton/polyester



Gris ligné
coton/polyester



Celadon
coton/polyester



Blanc
tissu éponge



Corail
tissu éponge



Canton
tissu éponge



Grège
tissu éponge



Camel
velours



Soft celadon
velours



Dusty rose
velours

Versions:

Bi-tec (imperméable, respirant, anti-bactérien à usage médical)

45% PE - 55% PU - bleu ciel

Coton 100% coton - blanc

Maintien au lit

Le matériel de positionnement (oreillers, pondérées de couverture, ...) permet de garantir l'immobilisation confortable du résident. Ces aides à elles seules pourraient néanmoins s'avérer insuffisantes en cas de risque de chutes et de blessures dues à la confusion ou à l'agitation du résident.

Dans ces circonstances, il est nécessaire de recourir à des solutions d'immobilisation plus solides telles que des sangles et des bandes. Celles-ci permettront également de protéger les tiers contre les réactions inattendues du résident.



Une grande variété d'utilisation grâce aux accessoires complémentaires à agencer entre eux ou à employer indépendamment

Ceinture taille, ceintures chevilles, ceintures poignets, ...

L'utilisation de telles méthodes, même si elle rassure, est souvent source de questionnement, voire de stress, pour le personnel soignant qui peut éprouver un sentiment de culpabilité ("est-ce bien nécessaire?") ou redouter des effets plus dramatiques que la chute elle-même.

C'est pourquoi RENOL s'est attelé à apporter des solutions pertinentes en pensant la **contention de manière différente**. Des solutions où non seulement la sécurité et le confort du résident sont primordiaux, mais aussi leur dignité physique et mentale.

Roll belt

Ce concept ingénieux allie un positionnement optimal en toute sécurité avec un maintien ferme, mais confortable et respectueux de la personne immobilisée. Ce dispositif de contention laisse au résident une large liberté de mouvement tout en l'empêchant de chuter ou de se relever précipitamment.

Plus d'info? www.renolcare.com



70 x 120 cm

Pondérée de couverture

Originaires de Scandinavie, elles ont fait l'objet de recherches scientifiques et sont utilisées dans le domaine de la santé depuis des années.

En raison de leur poids, les couvertures lestées exercent une légère pression sur le corps. Cette pression vous donne l'impression de recevoir un câlin affectueux. Cela permet au corps de se détendre.

Ce sentiment de détente, à la fois physique et mental, est causé par certaines hormones. L'utilisation d'une couverture de poids sur le corps favorise la production de sérotonine (hormone du bonheur) et de mélatonine (hormone du sommeil) et réduit la production de cortisol, l'hormone du stress. Il en résulte une sensation complète de détente du corps et du système nerveux.

Lorsque le résident dort sous une couverture lestée, il est très rapidement détendu. Cela facilite son sommeil profond et une augmentation du temps de sommeil. Le matin, il se lève vraiment reposé, de sorte que l'irritabilité et l'agitation pendant la journée seront beaucoup moins présentes.

Le poids d'une couverture lestée est important. Nous vous recommandons de prendre environ 10% du poids corporel comme poids de la couverture.

L'utilisation d'une couverture de poids peut être contre-indiquée si le résident souffre de diabète ou de problèmes pulmonaires. Il est donc recommandé de toujours demander conseil au médecin traitant.

Avantages

- Amélioration du sommeil avec un effet positif sur la vie quotidienne
- Effet relaxant
- Diminution de contrôle ou de l'agressivité grâce à l'utilisation de la couverture lestée
- Augmente la conscience corporelle


Nos couvertures de poids ont été renouvelées !

Il s'agit principalement du remplissage de nos couvertures lestées. Les couvertures sont maintenant remplies de petites perles de verre rondes de 0,8 mm. Cela offre de nombreux avantages par rapport aux granulés plastiques:

- Parce que les perles sont rondes et très fines, elles donnent une sensation très douce et confortable. La couverture se forme très bien autour du corps
- Les couvertures sont moins épaisses, car le verre a un poids spécifique plus élevé que le granulé de plastique.

Vous pouvez donc également choisir de faire fabriquer des couvertures plus lourdes

- Les perles de verre sont un produit 100% recyclé. Même après utilisation, le remplissage peut être entièrement recyclé
- Le verre est un produit moins cher que les granulés de plastique. Nos couvertures lestées sont donc également moins chères.
- Disponible en version coton ou PU.

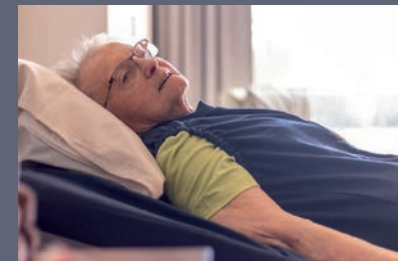

En plus des couvertures lestées en 2 tailles et en deux versions, la gamme sera élargie avec une couverture sous-abdominale lestée, un coussin pour la nuque et les épaules et un gilet lesté. Ceci pour les enfants et les adultes.



70 x 120 cm



140 x 200 cm

Version PU (imperméable, respirant, antibactérien à usage médical) 45% PE - 55% PU - Gris lavable.

La prévention et la prise en charge des escarres avec Repose

La **prévention et la prise en charge des escarres** sont des questions complexes qui exigent une approche intégrée offrant toujours une place centrale au résident.

Une **approche globale** exige une interaction continue entre les différents acteurs qui entourent le résident. Il s'agit des personnes chargées des soins quotidiens, des décideurs, mais aussi des fabricants et fournisseurs de matériels de soins.

L'apparition des escarres



1. Outre la pression et les cisaillements, vérifier également que les tissus ne sont pas déformés

Les forces de pression et de cisaillement entravent l'apport de sang oxygéné et l'élimination des déchets dans les vaisseaux sanguins et le système lymphatique. Les escarres apparaissent également suite à des lésions irréversibles plus profondes au niveau des cellules tissulaires. Ces lésions, appelées 'Deep Tissue Injuries' (DTI), sont principalement présentes aux endroits où le tissu est comprimé et déformé entre la surface dure sur laquelle le résident est assis ou couché et les saillies osseuses du squelette.

2. Pression en fonction de la durée: privilégier une pression basse constante et alterner les positions

Le temps joue un rôle crucial dans l'apparition des escarres. Tant une pression importante de courte durée qu'une pression légère de durée plus longue peuvent aboutir à des dommages tissulaires. De récentes découvertes ont démontré que même les pressions plus faibles et de courte durée pouvaient entraîner des dommages tissulaires. Il est donc

extrêmement important de maintenir la pression aussi basse que possible et de changer fréquemment le résident de position. Étant donné qu'il n'existe encore aucun consensus réel sur la fréquence de ce changement de position, il est essentiel d'adopter une approche personnalisée en fonction des caractéristiques du résident.

3. Veiller à un microclimat optimal

La perméabilité à la vapeur du matériel de prévention utilisé et la possibilité de réchauffer la peau sont souvent sous-estimées.

Une étude récemment menée par le Dr A. Gefen a indiqué que la perméabilité à la vapeur de la surface sur laquelle le résident s'assied ou se couche est même plus importante que la température de la peau pour l'intégrité de celle-ci.

4. Les radicaux libres exercent une influence néfaste sur les tissus environnants

Lors du rétablissement soudain de la circulation sanguine à la suite de la compression des tissus, les radicaux libres peuvent exercer une influence néfaste sur les tissus environnants, ce qui peut entraîner des escarres.

Source: Prévention et traitement des escarres Hospidex

Repose Simple et durable

La gamme Repose se compose de membranes de polyuréthane remplies d'air et reliées entre elles. Le polyuréthane de 50 µm d'épaisseur est extrêmement élastique : il peut **être étiré sur six fois son épaisseur** sans être déchiré ou perdre de son élasticité. L'association d'air et de couche de polyuréthane garantit la meilleure répartition possible de la pression par **immersion** et **enveloppement**.

La gamme Repose est la solution parfaite pour augmenter autant que possible la surface de contact entre le corps et la couche inférieure. Sa matière est respirante et de température neutre. Le microclimat optimal est ainsi assuré. Chaque produit est gonflé à la bonne pression grâce à la pompe unique Repose.

- L'association d'air à une couche de polyuréthane très élastique garantit une répartition optimale de la pression sur une surface maximale et minimise les cisaillements.
- L'air n'a aucune mémoire de forme et n'agit aucunement sur le corps lorsque celui-ci est comprimé ou lorsque le résident bouge.
- L'air présent dans les cellules communicantes de la gamme Repose réagit immédiatement aux changements de la position assise ou de la position couchée et s'y adapte directement.
- L'association d'air au film PU de la gamme Repose garantit une grande perméabilité à la vapeur sans augmenter la température de la peau.
- L'air ne freine pas les mouvements spontanés du résident.

La technologie brevetée « Smart Valve » garantit que la pression interne du produit Repose atteint 12 mmHg, la valeur optimale pour la répartition de la pression et l'efficacité clinique grâce à l'immersion et à l'enveloppement. La pompe sert en outre d'emballage aux produits Repose.

Le produit Repose peut être rapidement posé lorsque le résident court le risque de développer des escarres ou lorsque son état l'exige.



Repose Coussin

Parce que la prévention des escarres ne peut faire l'objet d'interruptions, les **coussins d'assise** Repose sont indispensables pour tous les résidents à risque qui se couchent directement sur le matériau répartissant la pression dans le lit. Les deux chambres à air aux extrémités sont plus larges afin de protéger les trochanters. Elles contribuent également à la stabilité et au confort d'assise. La couche en polyuréthane élastique et hypoallergénique de la housse neutralise totalement les cisaillements horizontaux qui peuvent s'exercer sur la peau et sur les tissus sous-jacents lorsque le résident glisse en position assise. La combinaison d'air et de 6 couches en polyuréthane élastique offre une répartition idéale de la pression, car elle prend en compte toute l'assise. En résultent une pression minimale et un confort optimal en position assise. En outre, les housses élastiques Inside en polyuréthane recouvert de polyester, équipées d'une fermeture à glissière, peuvent être utilisées comme protection supplémentaire des coussins d'assise Repose. Elles procurent ainsi un plus grand sentiment de sécurité en cas d'incontinence ou de confusion du résident.



Art. 1007506

Coussin Repose + pompe - 45 x 45 x 7cm

Repose Surmatelas

Le surmatelas Repose se compose de 16 chambres à air reliées entre elles. Cette solution réactive permet de répartir la pression de manière optimale pour chaque résident à risque. D'expérience, nous savons que les résidents sont confortablement couchés sur les solutions Repose, à fortiori ceux qui sont sensibles à la douleur...

Art. 1008734

Repose matelas + pompe - 190x77 cm

Art. 1559022

Repose - surmateles standard
190 x 77 cm 10 stuks + 1 pompe

Art. 1022245

Repose matelas 190 x 77 cm + coussin
45 x 45 x 7 cm + pompe repose



Lavage sans eau

Depuis que le lavage traditionnel à l'eau et au savon a été mis en place par Nightingale, cela est devenu très courant dans notre société occidentale. Nous vous présentons le lavage sans eau.



Jusqu'à présent, le lavage à l'eau et au savon est la méthode de lavage prédominante dans les centres de soins résidentiels belges. Les bénéficiaires de soins subissent souvent un stress, un froid et des douleurs inutiles en raison des nombreuses manipulations et stimuli. Cependant, le **lavage sans eau** commence à gagner du terrain dans les établissements de santé et dans les

formations Soins infirmiers (Hollevoet 2021). Lors de la toilette soignante sans eau, cinq à huit gants de toilette imprégnés prêts à l'emploi sont utilisés. Ces gants sont pourvus d'une lotion nettoyante et nourrissante, développée pour maintenir et / ou obtenir une qualité cutanée optimale. La lotion sèche rapidement à l'air, il n'est donc plus nécessaire de sécher

avec une serviette. Les gants de toilette sont à usage unique ce qui assure une meilleure hygiène. Pour rendre le soin agréable pour le destinataire des soins, les gants de toilette peuvent être chauffés au micro-ondes. Ceux-ci ont alors une température agréable lorsqu'ils entrent en contact avec le destinataire des soins. (Hollevoet 2014).



Le lavage traditionnel versus le lavage sans eau Les pour et les contre

Lavage traditionnel

- + Apaisant et bienfaisant
- + Le résident peut participer de manière interactive à l'événement de lavage
- + Se laver ou se doucher au lavabo encourage les soins personnels

Lavage traditionnel

- Prend plus de temps
- Pas très hygiénique, car l'eau n'est souvent pas assez changée
- Le résident a souvent froid
- Beaucoup de travail supplémentaire de préparation et de nettoyage
- Risque de chute lors de la douche ou du lavage à l'évier
- Plus encombrant pour laver les cheveux.

Lavage sans eau

- + Améliore la qualité de la peau
- + Un confort accru
- + Moins d'infections croisées
- + Moins fatigant pour le soignant et le résident
- + 40% de gain de temps en plus
- + Le temps gagné peut améliorer la qualité des soins
- + Lors de la cartographie de tous les coûts (consommation d'eau, produits de lavage, coûts de lavage des serviettes), le lavage sans eau est rentable

Lavage sans eau

- Plus de déchets en fin de soins
- Cette méthode de lavage est moins connue en Belgique et rencontre encore des résistances.
- Le temps libéré doit être utilisé correctement.



Soins du corps sans eau

Les gants de toilette

Cocune sans eau

sont élaborés suivant les plus hautes normes de qualité. Ils sont doux, épais, jetables et imprégnés d'une lotion hypoallergénique, sans parabènes adaptée pour la peau fragile. La lotion est légèrement parfumée, pour le confort du résident. Elle existe également en version non parfumée.

Les gants sont disponibles en paquet refermable de 5/8 unités et sont utilisés pour laver l'entièreté de corps tout en éliminant la nécessité du séchage. Ils peuvent même être réchauffés dans un micro-ondes ou armoire chauffante.

Art. 1558956 24 x 5 pcs parfumé

Art. 1558953 24 x 8 pcs non parfumé



Se laver les cheveux sans eau

Les charlottes

shampooing Cocune

permettent de laver facilement les cheveux des résidents, sans désagréments et sans qu'ils aient besoin de quitter leur lit. L'intérieur de la charlotte est imprégné d'un shampooing spécial sans parabènes ne nécessitant pas de rinçage à l'eau.

Il suffit de placer la charlotte sur les cheveux et masser le cuir chevelu pendant quelques minutes. Après le lavage, il est recommandé de sécher les cheveux et ensuite les mettre en forme.

Art. 1572169 24 pcs



Plus de confort

Réchauffez les gants de toilette Cocune ou les charlottes shampooing dans **l'armoire chauffante** pour plus de confort. Lisez bien les instructions.

Art. 1549688 - 16 divisions

Art. 1560535 - 24 divisions



Nilaqua 'towel-off' shampoo

Le shampooing aux pommes Nilaqua peut être utilisé lorsque le lavage des cheveux ou les shampooings traditionnels sont ressentis comme inconfortables et / ou ne sont pas disponibles. Le shampooing est à base d'eau et ne laisse pas de résidu collant.

Pour une utilisation optimale, nous recommandons d'appliquer le shampooing directement sur les cheveux jusqu'à ce qu'ils soient mouillés, tout en veillant à ne pas en appliquer trop à la fois (cheveux courts 10 ml, cheveux longs 30 ml). Nous conseillons ensuite de masser les cheveux pour décoller la saleté et la graisse et d'enlever le shampooing simplement avec une serviette. Pour les cheveux longs ou épais, il est recommandé de sécher avec un sèche-cheveux.

Avantages

- Pas d'eau ni de rinçage requis
- Plus facile pour le soignant
- Sans parabènes, sans latex et sans alcool
- Conçu pour une utilisation à long terme
- Rentable et respectueux de l'environnement
- Laisse les cheveux frais et propres
- Élimine les odeurs

Art. 1550798



Hygiène des mains

Vous êtes en bonnes mains



Le Nilaqua Sanitizer Plus est un produit sûr, écologique et sans alcool. La mousse est douce pour les mains, mais très efficace contre les germes.

Cette formule non toxique et non irritante tue jusqu'à 99,9999% des germes, y compris le virus Covid-19, le norovirus, le SARM, le CDIFF, l'E-Coli, la listeria et la salmonelle. Elle est fabriquée avec des ingrédients issus du commerce équitable et sans huile de palme, parabènes ni SLS.

La mousse est biodégradable et emballée dans un emballage solide (recyclable). Effet produits ses effets jusqu'à 6 heures après utilisation.

Avantages:

- Sans alcool et ininflammable
- Fonctionne dans les 30 secondes
- Homologué EN1500 et FAGG
- Sans danger pour les aliments, convient aux végétaliens et respectueux des normes halal
- Idéal pour les départements où les solutions volatiles sont interdites
- Réduction de l'apparition de problèmes de peau chez les utilisateurs
- Effet antimicrobien persistant

Art. 1559427

Promos

Ci-joint vous trouverez nos promotions pour les articles publiés dans ce numéro du Care magazine.

Comment commander?

- Site internet : www.arseus-medical.be
- Mail : info.care@arseus-medical.be
- Téléphone : 0800 76 988
- Votre représentant (p. 23)

Les prix sont hors tva et sont valables jusqu'au 31 mars 2021.

Positionnement

N° d'art	Description produit	Prix	Prix promo
1533411	Relax coussin pour talon, avec housse Bi-tec bleu.	€ 66,61	€ 44,63
1574310	Housse pour coussin Relax talon, couleur: grege	€ 25,81	€ 17,29
1540354	Relax coussin "Type S" , avec housse Bi-tec bleu.	€ 63,13	€ 42,30
1574309	Housse éponge pour coussin S couleur: grege	€ 39,30	€ 26,33
1540351	Relax coussin "support " avec housse Bi-tec bleu.	€ 18,32	€ 12,27
1572320	Housse cotton/poly pour coussin support couleur: Gitane lined	€ 11,97	€ 8,02
1532842	Coussin de positionnement Relax avec housse Bi-tec bleu	€ 51,41	€ 34,44
1532844	Coussin de positionnement Relax XL avec housse Bi-tec bleu	€ 78,72	€ 52,74
1549490	Coussin Relax AVC avec housse BI-tec bleu	€ 88,72	€ 59,44
1532847	Oreiller cervicale, Relax avec housse Bi-tec bleu	€ 19,57	€ 13,11

Suite positionnement p. 20

Prix hors tva valables jusqu'au 31/03/2021

Positionnement

N° d'art	Description produit	Prix	Prix promo
1540353	Relax coussin abduction avec housse Bi-tec bleu	€ 20,46	€ 13,71
1540352	Relax coussin pillow avec housse Bi-tec bleu	€ 35,21	€ 23,59
1549489	Relax coussin "U-sit" avec housse Bi-tec bleu	€ 22,89	€ 15,34
1549970	Oreiller compact, Relax avec housse Bi-tec bleu	€ 26,82	€ 17,97
1549488	Relax coussin "abduction" avec housse Bi-tec bleu	€ 57,75	€ 38,69
1551148	Relax coussin "Donut" avec housse Bi-tec bleu	€ 24,55	€ 16,45
1550466	Relax coussin de positionnement - Chair avec housse Bi-tec bleu	€ 47,73	€ 31,98

Fixation

N° d'art	Description produit	Prix	Prix promo
1543993	Roll belt ceinture abdominale renforcé S/M	€ 167,40	€ 94,00
1543994	Roll belt ceinture abdominale renforcé L	€ 167,40	€ 94,00
1544087	Ceinture pelvienne pour Roll Belt	€ 32,34	€ 19,00
1544078	Serrure magnétique	€ 15,22	€ 9,00
1544075	Clé magnétique	€ 6,98	€ 4,00

Pondérée de couverture

N° d'art	Description produit	Prix	Prix promo
1542040	Pondérée de couverture pu 70 x 120cm 4 kg	€ 158,97	€ 119,00
1542041	Pondérée de couverture pu 70 x 120cm 6 kg	€ 172,27	€ 129,00
1542359	Pondérée de couverture pu 200 x 140 4 kg	€ 281,40	€ 209,00
1542042	Pondérée de couverture pu 200 x 140 6 kg	€ 294,70	€ 219,00
1542043	Pondérée de couverture pu 200 x 140 8 kg	€ 308,00	€ 229,00
1574460	Pondérée de couverture pu 200 x 140 10 kg	€ 321,30	€ 239,00

Repose

N° d'art	Description produit	Prix	Prix promo
1007506	Omron Repose coussin + pompe 45 x 45 cm / 1 pc	€ 105,82	€ 71,95
1008734	Omron repose matelas + pompe 190 x 78 cm / 1 pc	€ 204,73	€ 162,00
1559022	Repose matelas 190 x 77 cm 10 pcs + 1 pompe	€ 1.795,00	€ 1.499,00
1022245	Omron matelas + coussin + pompe repose / 1 pc	€ 263,63	€ 220,00

Prix hors tva valables jusqu'au 31/03/2021

Lavage sans eau

N° d'art	Description produit	Prix	Prix promo
1558956	Cocune sense gants de toilette / 24 x 5 pcs Parfumé	€ 22,44	€ 16,00
1558953	Cocune sense gants de toilette / 24 x 8 pcs Non-parfumé	€ 29,39	€ 21,00
1572169	Cocune Charlottes shampooing / 24 pcs	€ 43,54	€ 38,00
1550798	Nilaqua no rinse shampoo 65 ml Pomme / 1	€ 2,42	€ 1,75
1549688	Intelligent warmer - Armoire chauffante 16 divisions /1	€ 894,23	€ 750,00
1560535	Intelligent warmer - Armoire chauffante 24 divisions /1	€ 1.222,78	€ 1.035,00

Hygiène des mains

N° d'art	Description produit	Prix	Prix promo
1559427	Nilaqua Sanitizer Plus FL 200 ml /20 pcs	€ 117,98	€ 80,00
1559460	Nilaqua Sanitizer Plus FL 500 ml /12 pcs	€ 99,20	€ 72,00

Prix hors tva valables jusqu'au 31/03/2021

Sales Representatives

Arnaud Vassart

Régions: Bruxelles, Brabant-Wallon
Liège & Nord de Namur
arnaud.vassart@arseus-medical.be
0497 57 57 63

Jean-Claude Malherbe

Régions: Hainaut, Luxembourg
& Sud de Namur
jean-claude.malherbe@arseus-medical.be
0476 33 22 29

Mieke Philips

Sales Manager
mieke.philips@arseus-medical.be
0496 16 31 82

Service clientèle

info.care@arseus-medical.be
0800 76 988

Quality

quality@arseus-medical.be
03 830 73 63

Arseus Medical

Rijksweg 10
2880 Bornem
info@arseus-medical.be
www.arseus-medical.be

Vous nous suivez déjà?



Arseus Medical



@arseusmedical



arseusmedical

Le prochain numéro du Care Magazine
publié par Arseus Medical sera diffusé en
avril 2021.

Vous avez des questions, des plaintes ou
des commentaires? Envoyez un mail à
marketing@arseus-medical.be

Ensemble pour mieux prendre soins des patients.

Arseus Medical est spécialisé dans la distribution de produits et d'équipements médicaux et paramédicaux répondant à l'ensemble des besoins en soins de santé.

Le bien-être du **patient et de la population est au cœur de nos préoccupations**. Nous oeuvrons en permanence pour construire des situations bénéfiques réciproques basées sur la confiance mutuelle et des collaborations à long terme.

ER. Arseus Medical nv Rijksweg 10 2880 Bornem



ARSEUS MEDICAL
Driving superior care

www.arseus-medical.be

